

## **Склад**

- Поліетиленгліколь - 0,4%,
- Пропіленгліколь - 0,3%.
- Гідроксіпропілгуар - 0,16-0,19%.
- Кислота борна - 0,7%.
- Калію хлорид - 0,12%.
- Натрію хлорид - 0,1%.
- Сорбітол - 1,4%.
- 2-аміно-2-метілпропанол - 0,57%.
- Поліквад ® (хлорид полідронія) - 0,001%.
- Кислотахлористоводнева і / або натрію гідроксид (для доведення рН).
- Вода очищена - до обсягу 100%.

## **Опис**

«Сістейн ® Ультра» - засіб для зволоження очей.

Засіб забезпечує тимчасове полегшення симптомів синдрому «сухого ока», таких як відчуття печіння і подразнення.

«Сістейн ® Ультра» може бути використано для змазування і зволоження силікон-гідрогелевих і м'яких (гідрофільних) контактних лінз денного і пролонгованої режимів носіння.

Засіб зволожує контактні лінзи, зменшуючи дискомфорт при носінні контактних лінз, і допомагає видалити відкладення з їх поверхні, які можуть стати причиною подразнення і / або дискомфорту.

## **Протипоказання**

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.

## **Особливості застосування**

Не торкайтеся до кінчика піпетки флакона, оскільки це може призвести до забруднення розчину.

Безпека і ефективність застосування під час вагітності та лактації не досліджувалися. Можливе застосування при вагітності та в період лактації за призначенням лікаря, якщо очікуваний ефект перевищує ризик розвитку можливих побічних ефектів.

Дотримуйтеся рекомендацій Вашого лікаря-офтальмолога та інструкції по застосуванню.

При триваючому дискомфорті, слезотечі, зміні зору, почервоніння очей, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем.

Не використовуйте розчин після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Не застосовувати препарат розчин, якщо упаковка розкрита або пошкоджена.

### **Спосіб застосування**

Перед застосуванням флакон струшувати.

Засіб може застосовуватися в міру необхідності протягом дня для зволоження і збільшення комфорту очей.

Закапайте 1-2 краплі в кожне око і поморгайте.

При носінні контактних лінз в разі незначного подразнення, дискомфорту або помутніння, закапайте 1-2 краплі в кожне око і поморгайте 2-3 рази.

Може бути використано до і під час носіння контактних лінз, а також після їх зняття.

### **Термін придатності**

6 місяців після першого відкриття флакона.

### **Умови зберігання**

Зберігати при кімнатній температурі, в недоступному для дітей місці.

Зберігайте флакон щільно закритим.

### **Упаковка**

По 10 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

АЛКОН КУЗІ С.А., Іспанія