

Опис

Гілайс - 0,4% офтальмологічний розчин гіалуронату натрію з високою молекулярною масою, продукт біотехнологічного синтезу.

Гіалуронат натрію має мукоміметичні, мукоадгезивні і в'язкопружні властивості, завдяки чому поліпшує стабільність сльозової плівки і забезпечує комфорт поверхні ока - змащення, зволоження і захист. Зволожуючі і захисні властивості гіалуронату сприяють усуненню роздратування, відчуття сухості, печіння і стороннього предмета в очах через вплив навколишнього середовища, а саме вітру, сонця, сухого повітря, солоної води, диму, занадто яскравого світла, кондиціонованого повітря, опалення, тривалої роботи за комп'ютером або, в разі хірургічної операції на очах, кон'юнктивіту або частого і тривалого користування контактними лінзами.

Гілайс - стерильний офтальмологічний розчин. В упаковці міститься 1 флакон 10 мл, є еквівалентом для більш ніж 250 крапель, флакон оснащений інноваційним запатентованим багатодозовим офтальмологічним дозатором натискного типу (OSD), без консервантів. OSD захищає розчин від попадання потенційно шкідливих бактерій, розчин залишається стерильним протягом 120 днів після першого використання.

Рекомендації щодо застосування

Гілайс закапувати по 1 краплі в око 2-3 рази на добу при необхідності. Закапувати 1 краплю в око, не сильно стискаючи флакон.

Медичний виріб, як правило, призначений для постійного використання протягом не більше 30 днів; якщо симптоми зберігаються, слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування

Не застосовувати препарат у разі пошкодження флакона.

Не застосовувати препарат у випадку впливу четвертинних сполук амонію.

Не застосовувати препарат у випадку чутливості до будь-якого з компонентів.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі і зовнішній упаковці.

Не торкатися поверхні ока наконечником флакона.

Після використання в рідкісних випадках можлива незначна короточасна нечіткість зору, обумовлена в'язкістю розчину.

З урахуванням цього рекомендується почекати кілька секунд до початку діяльності, що вимагає чіткості зору.

Інтервал до закапування будь-якого іншого офтальмологічного засобу для зовнішнього застосування повинен становити принаймні 10-15 хв. Не ковтати. Медичне обладнання було розроблене виключно для офтальмологічного використання. Медичний виріб містить фосфати. У деяких пацієнтів з сильно пошкодженою рогівкою в рідкісних випадках спостерігалось явище кальцифікації рогівки при застосуванні крапель очних з вмістом фосфатів; отже, не рекомендується застосування в терапії пацієнтів із значним ушкодженням поверхні рогівки (наприклад з сильною ерозією або виразкою рогівки).

Умови зберігання

Термін придатності після відкриття флакона - 120 днів. Після завершення використання флакон слід викинути належним чином. Зберігати при кімнатній температурі в недоступному для дітей місці.