

Склад

Натрієва сіль гіалуронової кислоти, α -гліцерілфосфорілхолін, вітамін В12 (ціанокобаламін), вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид), D-пантенол, буферний ізотонічний розчин рН 7,2.

Характеристика

Різні травми механічного, хімічного або фізичного характеру можуть пошкоджувати цілісність поверхні рогівки. Епітелій рогівки містить багато нервових закінчень, які забезпечують підтримку морфофункціональної цілісності.

Офтассіале, краплі очні, містить гіалуронову кислоту, гліцерілфосфорілхолін і D-пантенол, які сприяють реепітелізації і відновленню нервових закінчень рогівки.

Офтассіале, краплі очні, збільшують обсяг слізної плівки і сприяють її стабілізації. Комплекс вітамінів (вітамін В12 і вітамін В6), який міститься в розчині, підсилює захисну властивість поверхні ока, обмежуючи негативний вплив зовнішніх факторів і хірургічних втручань.

Офтассіале, краплі очні, є медичним виробом, призначеним для зволоження, захисту рогівки, а також для зменшення дискомфорту в очах, больових симптомів, викликаних відчуттям стороннього тіла, зовнішніми факторами, хірургічними операціями і травмами, що піддаються місцевому лікуванню.

Офтассіале, краплі очні, сприяють процесам реепітелізації рогівки і відновлення нервових закінчень.

Технологія OSD (офтальмологічний дозатор натискного типу) забезпечує інноваційну доставку абсолютно стерильних очних крапель без консервантів.

Рекомендації по використанню

Немає необхідності видаляти контактні лінзи перед використанням Офтассіале, крапель очних.

Перед використанням медичного виробу слід помити руки.

Закапувати по 1-2 краплі в кожне око 2-3 рази на добу або за рекомендаціями лікаря.

Переконайтеся, що крапельниця не контактує з поверхнею ока.

Особливі вказівки

У разі виникнення побічних реакцій слід припинити застосування медичного виробу і звернутися до лікаря.

Перед використанням медичного виробу необхідно переконатися, що контейнер не пошкоджений.

Не використовуйте телевизор після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Термін придатності зазначений у відношенні запечатаного продукту за умови належного зберігання.

Для закапування в очі, не ковтати.

Не використовуйте Офтассіале, краплі очні, якщо у вас алергія або в разі відомої гіперчутливості до компонентів медичного виробу.

Умови зберігання

При температурі не вище 30 ° С.

Упаковка

По 10 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Д.М.Г. Італія С.р.л / D.M.G. Italia S.r.l.