

Склад

1 г засобу змащуючого офтальмологічного ВітА-ПОС® містить:
Вітамін-А-пальмітат - 250 МО;
білий вазелін, рідкий парафін, світлий рідкий парафін, ланолін.

Опис

ВітА-ПОС®

Засіб змащуючий офтальмологічний

Містить вітамін А

Не містить консервантів!

Область застосування

- для поліпшення стану слізної плівки і захисту очної поверхні;
- для усунення дискомфорту при відчутті "сухості", почутті стороннього тіла, печіння в очах, в тому числі тих, що під впливом: *кліматичних чинників*, таких як, кондиційоване повітря в автомобілі, в літаку; вітер, холод, інтенсивне сонячне випромінювання, екологічно хворе повітря або сигаретний дим; *інтенсивного зорового навантаження*, наприклад, при тривалій роботі з комп'ютером, фотокамерою, при надмірному перебуванні перед телевизором, необхідності управління автотранспортом у нічний час доби, при тривалому носінні контактних лінз.

Властивості

Медичний виріб «Засіб змащуючий офтальмологічний ВітА-ПОС®» - стерильний маслоподібний засіб, призначений для закладання в кон'юнктивальний мішок, що містить вітамін А (250 МО ретинолу пальмітату в 1 г засобу.)

Вітамін А, що входить до складу засобу ВітА-ПОС®, є природною складовою частиною слізної плівки і надає засобу ніжну маслообразную консистенцію, яка забезпечує його хороше змішування з природною слізною рідиною і обумовлює тим самим гарну переносимість засобу.

Засіб ВітА-ПОС® - особливо м'який і ніжний маслоподібний засіб, який, рівномірно розподіляючи і тривало утримуючись на передній поверхні ока (рогівці і кон'юнктиві), сприяє поліпшенню стану слізної плівки і тим самим надійно захищає рогівку від пересихання.

Застосування засобу ВітА-ПОС® сприяє швидкому зникненню суб'єктивних симптомів дискомфорту: печіння, "сухості", почуття стороннього тіла.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів, що входять до складу засобу ВітА-ПОС®.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Засіб змащуючий офтальмологічний ВітА-ПОС® не слід застосовувати одночасно з іншими офтальмологічними засобами. У випадках, якщо не можна уникнути одночасного застосування, рекомендується дотримуватися паузу не менше 30 хвилин між використанням іншого офтальмологічного засобу і застосуванням медичного виробу ВітА-ПОС®.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Так як відразу після застосування засобу ВітА-ПОС® може виникнути короточасне затуманення зору, що приводить до уповільнення психічних і фізичних реакцій, не рекомендується застосовувати його безпосередньо перед роботою з механізмами та водінням автотранспорту. У зв'язку з цим, рекомендується застосування засобу ВітА-ПОС® перед нічним сном.

Спосіб застосування та дози

Рекомендується закладати смужку засобу довжиною 1 см в кон'юнктивальний мішок від 1 до 3 разів на день. Частота використання встановлюється індивідуально в залежності від Ваших відчуттів, способу життя і згідно з рекомендаціями лікаря-офтальмолога.

Особливо ефективно використання ВітА-ПОС® перед нічним сном.

Не існує обмежень щодо тривалості застосування засобу ВітА- ПОС®. У разі, якщо після застосування засобу ВітА-ПОС® протягом декількох днів

пред'являються Вами скарги або дискомфорт зберігається, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем-офтальмологом.

Спосіб застосування та рекомендації при носінні контактних лінз

Застосовуючи засіб ВітА-ПОС®, будь ласка, уникайте контакту кінчика туби з очима або шкірою. Відкрутіть захисний ковпачок, нахиліть голову трохи назад, злегка відведіть нижню повіку вниз і м'яко натисніть на тубу, видавлюючи смужку засобу довжиною 1 см в кон'юнктивальний мішок, не переламуючи і не звертаючи тубу.

Повільно закрийте повіки. Після процедури ретельно закрийте ковпачок. Засіб ВітА-ПОС® не слід застосовувати під час носіння контактних лінз! Рекомендується використання ВітА-ПОС® на ніч, після зняття лінз.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 0С.

Після першого відкриття туби слід використовувати ВітА-ПОС® протягом 12 тижнів. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

5 г засобу ВітА-ПОС® в алюмінієвій тубі, вміщеній в картонну пачку.

Виробник

Урсафарм Арцнайміттель ГмбХ (Ursapharm Arzneimittel GmbH).

Індустріштрассе 35, 66129 Саарбрюкен, Німеччина (Industriestrasse 35, 66129 Saarbruecken, Germany)