

## **Склад**

100 г спрею містять 100 г нерозведеної ізотонической стерильною морської води.

## **Опис**

«Хьюмер» - засіб для м'якого промивання носа. Препарат розріджує секрет слизової оболонки носа, сприяє його виведенню та відновленню вільного дихання.

## **Показання**

*Для щоденної гігієни порожнини носа:*

- зволоження слизової оболонки носа в умовах сухого повітря;
- очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів;
- профілактика інфекцій носової порожнини в осінньо-зимовий період;
- зменшення сухості слизової оболонки носа.

*Як допоміжний засіб при лікуванні:*

- гострих і хронічних запальних процесів носоглотки, носових порожнин та пазух;
- гіпертрофії аденоїдів у дітей;
- алергічний (вазомоторний) сезонного або цілорічного риніту;
- в післяопераційному періоді після хірургічних втручань на органах носової порожнини.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів виробу медичного призначення.

## **Спосіб застосування та дози**

«Хьюмер» призначають дітям старше 15-ти років і дорослим.

*Рекомендоване дозування:*

- з профілактичною та гігієнічною метою - 3-6 разів на добу по 2-3 вприскування в кожную ніздрю;
- з метою лікування як допоміжний засіб при базовому лікуванні - 4-8 разів і в на добу по 2-3 вприскування в кожную ніздрю.

Курс лікування - 2-4 тижні.

Курс лікування рекомендується повторювати через 1 місяць.

*Порядок проведення процедури:*

1. Нахилити голову в сторону.
2. Ввести насадку в ніздрю, який знаходиться зверху.
3. Протягом 2-3 секунд натискати на насадку, щоб промити ніс.
4. Продути ніс, щоб очистити його від слизу.
5. Можна повторити процедуру (в разі необхідності).
6. Провести процедуру з іншим носовим ходом.

Процедуру найбільш ефективно проводити до їди.

Після використання насадки промити водою.

Зберігати балончик і насадку в коробці.

Використовувати індивідуально.

Застосування в період вагітності або годування груддю - протипоказань немає.

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в місці, яке недоступне для дітей.

### **Упаковка**

По 150 мл в флаконі, по 1 флакону в упаковці.

### **Виробник**

Лабораторієз УРГО, Франція.