

## **Склад**

В 100 мл «Квікс® евкаліпт» міститься: вода Атлантичного океану, вода очищена та олія евкаліпту (0,015 мл на 100 мл).

Концентрація солі у «Квікс® евкаліпт» відповідає приблизно 2,6% NaCl.

Містить тільки натуральні інгредієнти.

Не містить консервантів.

## **Опис**

«Квікс® евкаліпт» – містить воду Атлантичного океану, багату на корисні мінерали та мікроелементи, а також олію евкаліпта.

Концентрація солі у спреї «Квікс® евкаліпт» перевищує таку в слизовій носа (гіпертонічний розчин солі), що створює осмотичний тиск, який усуває закладеність носа.

«Квікс® евкаліпт» – це натуральний засіб для зменшення закладеності у носових ходах і додаткових пазухах носа.

## **Властивості медичного виробу**

- «Квікс® евкаліпт» зменшує закладеність носа та забезпечує відчуття свіжості.
- Завдяки підвищеному вмісту солі, «Квікс® евкаліпт» виводить надмірну рідину з слизової оболонки носа, зменшуючи її набряк, закладеність носа та навколо носових пазух.
- Розріджуючи слиз та знімаючи запалення, «Квікс® евкаліпт» полегшує сякання
- Освіжаючий ефект евкаліптової олії залишає відчуття свіжості у носі, а також у його додаткових пазухах та забезпечує полегшення дихання.

## **Показання**

- Допомога закладеним носовим ходам та додатковим пазухам носа при застуді та грипі.
- Активне очищення носових ходів.
- Сильний освіжаючий ефект.

## **Протипоказання**

- Гіперчутливість до морської води або олії евкаліпту.
- Дитячий вік до 6 років.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

На сьогодні взаємодій з іншими лікарськими засобами виявлено не було.

## **Спосіб застосування та дози**

Діти від 6 до 12 років: 1-2 впорскування у кожний носовий хід 2-3 рази на добу.

Дорослі та діти старше 12 років: 1-3 впорскування у кожний носовий хід 2-3 рази на добу.

## Досвід застосування в особливих групах пацієнтів

Вагітність та годування груддю

Будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм лікарем у разі застосування в період вагітності та годування груддю.

## Струсити перед використанням

1. Зніміть ковпачок.
2. Підготуйте спрей до застосування, кілька раз натиснувши на манжету наконечника до досягнення дрібного аерозольного розпилення.
3. Вставте наконечник у носовий хід та натисніть на манжету по обидва боки наконечника.
4. Протріть наконечник чистою серветкою та надіньте ковпачок.
5. Наконечник забезпечує дозований потік та рівномірний розподіл спрею.

Будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо тривалості застосування «Квікс® евкаліпт».

Не викликає звикання.

## **Побічні реакції**

Олія евкаліпту може викликати алергічні реакції (включаючи задишку) у пацієнтів з підвищеною чутливістю до евкаліпту.

На початку використання може виникати легке відчуття печіння.

*Використовувати з обережністю*

Після оперативних втручань і травм в області носа «Квікс® евкаліпт» слід застосовувати лише після консультації з лікарем.

### **Умови зберігання**

Зберігати при кімнатній температурі, в недоступному для дітей місці.

Не використовуйте «Квікс® евкаліпт» після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Після відкриття флакону «Квікс® евкаліпт» слід використати протягом 6 місяців.

### **Упаковка**

Флакон спрею «Квікс® евкаліпт» містить 30 мл розчину. У кожному флаконі міститься приблизно 220 доз. Флакон оснащений системою антибактеріального захисту, який запобігає проникненню мікробів протягом всього періоду використання. «Квікс® евкаліпт» є медичним виробом.

### **Виробник**

Фармастер

Виробнича зона де Краффт.

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

67150 Ерстейн, Франція