

## **Опис**

Тест-смужки для глюкометра One Touch Select застосовуються в якості індикатора для кількісного визначення рівня глюкози у свіжій венозній, артеріальній і капілярній крові, взятої з пальця.

## **Переваги**

Перед тим, як придбати прилад, потенційні користувачі читають відгуки в інтернеті. Вони цікавляться не тільки про зручність експлуатації, а й про якість витратних матеріалів, оскільки від них безпосередньо залежить точність вимірювань. Купивши упаковку тест-смужок One Touch Select людині забезпечені простота проведення аналізу і якість вимірювань завдяки таким особливостям:

1. Пристрій кодується автоматично після вставлення смужки в гніздо апарату.
2. Двоелектродна будова забезпечує точність, оскільки зіставляються свідчення 2 електродів.
3. Кров втягується автоматично за рахунок капіляра на виробі.
4. Можна брати кров не тільки з пальця, а з інших місць, завдяки гідрофільному адгезивному шару.
5. Прилад не включається, якщо стрип вставлений неправильно, що знижує ризик отримання некоректного результату.
6. Контрольне поле змінить забарвлення, в разі недостатнього об'єму крові.
7. Чутливі ділянки захищені від вологи, забруднень, високих температур, УФ випромінювання.

## **Спосіб застосування та дози**

Перед аналізом, перевірте термін придатності на флаконі - витратні матеріали не можна використовувати пізніше, ніж через 6 місяці після його відкриття.

Процедура проводиться в наступній послідовності:

1. Вставте смужку в прилад, тим боком, на якій стоїть стрілка.
2. Проколiть палець.
3. Піднесіть палець до смужці, щоб капіляр на кінці виробу торкався до краплі.
4. Відбудеться втягування необхідного об'єму крові.
5. Дочекайтеся результату і витягніть расходник, після чого прилад автоматично відключиться.

## **Термін придатності**

Термін зберігання після відкриття флакона - 6 місяців.

### **Умови зберігання**

Температура зберігання: 2 °С - 30 °С.

Зберігайте тест-смужки в сухому прохолодному місці, далеко від прямих сонячних променів і джерел тепла. Забороняється заморожувати.

### **Упаковка**

По 25 шт в тубусі, по 2 тубуса в упаковці.

### **Виробник**

Лайфскан Юроп, Швейцарія.