

Опис

Термометр медичний скляний без ртуті Paramed – сучасний, безпечний і точний термометр для тих, хто не довіряє електронним і побоюється використовувати ртутні аналоги. Термометрична рідина не містить ртуть, вона містить суміш альтернативного металу рідин: галій, індій, олово, які не є токсичними, тому не може нашкодити здоров'ю людини або довкіллю.

Показання

Для виміру температури тіла.

Особливості застосування

Головна відмінність: збивати термометр Paramed потрібно в кейсі, який йде в комплекті. Для цього необхідно помістити термометр у футляр і закрутити ковпачок-тримач. Короткими різкими рухами кисті руки, переміщуйте футляр вгору і вниз. Футляр дозволяє швидко і без зусиль збити внутрішню суміш до мінімального рівня.

Переваги

Безртутний термометр Paramed має низку переваг:

- виріб відповідає стандартам якості, має державну сертифікацію;
- простий у використанні;
- виготовлений з абсолютно безпечних матеріалів;
- стабільна медична точність вимірювання;
- великий розмір шкали (значення 37°C – червоного кольору);
- тривалий термін експлуатації і економічність;
- максимально проста конструкція;
- футляр в комплекті для зручності використання.

Очищення і дезінфекція

Промийте термометр, протріть його сухою ганчіркою і продезінфікуйте наконечник етанолом (етиловим спиртом) або спеціальним розчином дезінфікуючого засобу. В якості альтернативи можна мити милом і холодною водою.

Характеристики

- похибка виміру: (максимально допустима) 0,1°C;

- вимірювання у широкому діапазоні: 35°C - 42°C;
- матеріал: скло;
- наповнення: галій, індій, олово;
- тип: термометр безртутний;
- підходить для ректального застосування.

Спосіб застосування та дози

Вимірювання температури:

1. Дістаньте термометр із захисного футляра.
2. Переконайтеся, що стовпчик рідини термометра трохи нижче 35°C.
3. Помістіть термометр резервуаром в пахову западину.
4. Притисніть передпліччям.
5. Зафіксувавши його.
6. Тримайте 5-7 min (хв) перед оцінюванням шкали.
7. Футляр в комплекті для зручності зберігання.

Умови зберігання

Берегти від дітей.

Упаковка

Картонна коробка.

Виробник

Донг-ІІ-Джіао І-Хуа Медікал Еквіпмент ко Лтд, Китай/Донг І І Хау Медікал
Текнолоджі Ко., Лтд