

Опис

Наявність назальної та назофарингеальної сапрофітної флори має важливе значення для збереження здоров'я верхніх дихальних шляхів та організму людини в цілому. Зміна складу сапрофітної флори слизової оболонки носа може призвести до розвитку серйозних захворювань у цій ділянці, таких як рецидивуючий отит, риносинусит, аденоїдит, а також схильності до розвитку ускладнень у нижніх дихальних шляхах. Різноманітні екологічні, фізичні чи хімічні фактори можуть впливати на склад цієї вразливої мікробної екосистеми.

Риножерміна — це медичний виріб з механічною дією, яка спрямована на відновлення природного біологічного бар'єру; складається з автохтонних сапрофітів та зменшує поверхневий натяг носового слизу.

Риножерміна рекомендована:

- при лікуванні та профілактиці інфекцій верхніх дихальних шляхів, таких як отит, риносинусит, аденоїдит;
- після місцевого нанесення та/або системного лікування антибіотиками для сприяння відновленню нормальної назофарингіальної сапрофітної флори;
- у всіх випадках, коли є доцільним сприяти відновленню нормальної назальної та назофарингеальної сапрофітної флори (місцеве лікування слизової оболонки носа, алергічний риніт, БА, хронічний бронхіт, хронічне ушкодження від вдихання диму або подразнювальних речовин і т.д.).

Рекомендації щодо застосування

1. Відкрити пакет-саше вздовж позначеної пунктиром лінії, відкрити флакон і обережно, щоб не розсипати, висипати вміст пакета-саше у флакон.
2. Закрити флакон кришкою, інтенсивно струсити.
3. Відкрити флакон і зафіксувати розпилювач після зняття захисної плівки, сильно її потягнувши, не торкаючись внутрішньої сторони розпилювача.
4. Енергійно струснути флакон та зняти кришку з розпилювача.
5. Перед використанням медичного виробу зробити кілька натискань для активації розпилювача. При використанні медичного виробу слід нахилити трохи вперед і вприскувати медичний виріб у порожнину носа без вдихання.
6. Закрити розпилювач кришкою і зберігати в холодильнику.

7. Перед використанням медичного виробу рекомендується витримати його при кімнатній температурі приблизно 15 хв.

8. Струшувати перед кожним використанням.

Дорослим та дітям: по 2 вприскування (мінімум 5×10^9 КУО) в кожен ніздрю 2 рази на добу протягом 7 днів підряд, повторюючи лікування протягом щонайменше 3 міс або за вказівкою лікаря. Приготовлений розчин слід зберігати в холодильнику при температурі 4°C. Медичний виріб можна використовувати протягом не більше 7 днів після приготування.

Особливі вказівки

Не використовувати медичний виріб за наявності наступних проявів:

- відома гіперчутливість до будь-якого компонента медичного виробу;
- вроджений або набутий імунодефіцит, рак, хіміотерапія або у пацієнтів зі встановленим центральним венозним катетером;
- ендокардит, наявний чи в анамнезі, та/або стани, що спричиняють розвиток ендокардиту;
- наявність натуральних ароматизаторів може вплинути на органолептичні властивості медичного виробу Риножерміна, можлива зміна кольору без погіршення якості продукту.

В разі виникнення будь-яких побічних реакцій слід припинити застосування медичного виробу і звернутися до лікаря.

Не ковтати.

Медичний виріб можна використовувати протягом 7 днів після приготування.

Перед застосуванням пересвідчитися в цілісності упаковки.

Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Уникати контакту з очима.

Медичний виріб призначений для індивідуального використання.

Не викидати контейнер після його використання в навколишнє середовище (з метою уникнення забруднення довкілля).