

## **Склад**

*Плівка РП-У* призначена для одержання рентгенівських знімків з використанням посилюючих екранів як синього, так і зеленого світіння при однаковій експозиції для обох випадків.

*Плівка РП-У* виготовляється з матеріалів наданих концерном AGFA, що забезпечує високу якість як самої плівки, так і одержуваних зображень.

*Широка сфера застосування.*

Висока розподільча здатність рентгенівської плівки РП-У дозволяє чітко встановити патологію захворювань і виключити повторні обстеження, цьому сприяє висока вибірковість і максимальна кількість градацій сірого кольору (256 відтінків). Висока фотографічна широта визначає стабільну відтворюваність знімків і стійкість до змін режимів обробки.

Плівка добре обробляється як у ручному, так і в автоматичному режимі.

Розмір аркушу: 13 см x 18 см.

## **Рекомендації з освітлення темної кімнати**

Рекомендується використовувати спеціальний червоний світлозахисний фільтр. Його слід використовувати разом з 15-ватною матовою лампою й розміщати на відстані не менш 1,2 м від завантажувально-розвантажувального обладнання проявної машини, а при ручній обробці - від верхньої площини робочого стола або обладнання для фотохімічної обробки.

## **Термін придатності**

2 роки.

## **Умови зберігання**

Впаковану неекспоновану плівку зберігати вертикально при температурі 10-23 °С у сухім місці, при вологості 30-50%. Плівку необхідно оберігати від джерел іонізуючої радіації.

## **Упаковка**

По 1 листу в картонній упаковці.

## **Виробник**

ПП "Фірма Оніко", Україна.