

## **Склад**

В 100 мл «Квікс® алое» міститься: 28,6 мл води Атлантичного океану, 71,4 мл води очищеної та 0,05 г екстракту алое вера.

Концентрація солі у «Квікс® алое» відповідає приблизно 9 г NaCl на літр (ізотонічна).

Не містить хімічних добавок і консервантів.

## **Лікарська форма**

«Квікс® алое» – природний ізотонічний спрей назальний, що містить воду Атлантичного океану, багату на корисні мінерали та мікроелементи, а також екстракт алое.

Концентрація солі у «Квікс® алое» відповідає її природній концентрації в організмі, а тому не пошкоджує слизову носа.

«Квікс® алое» – це натуральний засіб для зволоження слизової оболонки носа, зняття подразнення, покращення її функції фільтрації та зволоження повітря, яке ми вдихаємо. У такий спосіб підтримується здоровіший стан дихальних шляхів.

*Властивості медичного виробу:*

- Сприяє підтримці функції носа в здоровішому стані.
- Очищує слизову носа від бактерій, вірусів, алергенів, кірок, слизу, часток пилу.
- Розріджує слиз та сприяє його видаленню.
- Чинить зволожуючий ефект, знімає подразнення слизової оболонки носа.

## **Показання**

- Щоденна гігієна та догляд за носовою порожниною для підтримки захисних властивостей слизової.
- М'яке очищення слизової оболонки носа.
- Полегшення симптомів сухості та подразнення слизової оболонки носа.
- Профілактика гострих вірусних респіраторних інфекцій (також при хронічних запальних захворюваннях носової порожнини, навколоносових пазух, носоглотки).
- Профілактика назальних алергічних реакцій (також під час вагітності та в період годування груддю)

- Як додатковий засіб при лікуванні гострих та хронічних запальних захворювань носової порожнини, навколоносових пазух і носоглотки.
- Підготовка порожнини носа до нанесення лікарських засобів.
- В якості засобу допомоги дітям, які не можуть самостійно сякатися.

## **Протипоказання**

- Гіперчутливість до морської води або алое вера.
- Діти до 6 місяців.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

На даний момент взаємодій з лікарськими засобами виявлено не було.

## **Спосіб застосування та дози**

Діти від 6 місяців до 6 років: 1 впорскування у кожний носовий хід 4 рази на добу.

Дорослі та діти старше 6 років: 1-3 впорскування у кожний носовий хід кілька разів на добу, у разі необхідності.

## Досвід застосування в особливих групах пацієнтів

### *Вагітність і годування груддю*

Дозволений до використання під час вагітності та в період годування груддю;

Післяопераційне застосування.

Будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм лікарем у разі застосування після хірургічних втручань.

1. Зніміть ковпачок.
2. Підготуйте спрей до застосування, кілька раз натиснувши на манжету наконечника до досягнення дрібного аерозольного розпилення.
3. Вставте наконечник у носовий хід та натисніть на манжету по обидва боки наконечника.
4. Протріть наконечник чистою серветкою та надіньте ковпачок.
5. Наконечник забезпечує дозований потік та рівномірний розподіл спрею, який зволожує та очищує слизову оболонку носа.

«Квікс® алое» можна використовувати перед застосуванням інших назальних спреїв.

Тривалість використання не обмежена.

Не викликає звикання.

### **Побічні реакції**

На даний момент побічних ефектів виявлено не було.

Використовувати з обережністю.

Після оперативних втручань і травм в області носа «Квікс® алое» слід застосовувати лише після консультації з лікарем.

### **Умови зберігання**

Зберігати при кімнатній температурі, в недоступному для дітей місці.

Не використовуйте «Квікс® алое» після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Після відкриття флакону «Квікс® алое» слід використати протягом 6 місяців.

### **Упаковка**

Флакон спрею «Квікс® алое» містить 30 мл розчину. У кожному флаконі міститься приблизно 220 доз. Флакон оснащений системою антибактеріального захисту, який запобігає проникненню мікробів протягом всього періоду використання.

«Квікс® алое» є медичним виробом.

### **Виробник**

Фармастер

Виробнича зона де Краффт.

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

67150 Ерстейн, Франція.