

## **Призначення**

Спринцівки застосовуються для медичних цілей в лікувальних установах, а також для індивідуального використання в домашніх умовах. Спринцівка типу Б являє собою балон, в горловину якого вставлений наконечник.

## **Спосіб застосування та дози**

Перед першим використанням балон спринцівки ретельно вимити гарячою водою та продезінфікувати кип'ятінням протягом 30 хвилин, після чого промити кип'яченою водою. Наконечник поліетиленовий необхідно простерилізувати зануренням у 6% розчин перекису водню на 6 годин. Після стерилізації наконечник необхідно промити кип'яченою водою. В подальшому спринцівку перед використанням промити гарячою водою і сполоснути кип'яченою водою. Перед використанням наконечник необхідно змастити нейтральним жиром.

Балон спринцівки стиснути рукою, наконечник опустити в медичний розчин і, послабивши тиск на балон, наповнити його розчином. Потім ввести наконечник спринцівки в порожнину організму і стискаючи наповнений балон, ввести рідину. Після використання спринцівки необхідно промити гарячою водою.

Спринцівка повинна контактувати з лікарськими розчинами не більше 30 хвилин. Містить фталати. Спринцівку для олій не застосовувати.

## **Термін придатності**

5 років.

## **Умови зберігання**

Зберігати при кімнатній температурі.

## **Упаковка**

Спринцівка у картонній упаковці.

## **Виробник**

ТОВ "Поліком", Україна.