

## **Опис**

Медичний виріб, призначене для проведення лікувально-профілактичних процедур (промивання різних порожнин організму), а також для процедур з відсмоктування рідин з організму в період реабілітації після операційних втручань.

## **Переваги**

- можливість багаторазового використання;
- герметичне з'єднання балона з наконечником;
- висока еластичність балона;
- стійки до багаторазових термічним обробкам;
- відсутність токсичних і алергічних складових.

## **Призначення**

- відсмоктування рідини з порожнин організму в післяопераційний період;
- промивання і зрошення порожнин організму в лікувально-профілактичних цілях;
- для постановки клізм

## **Спосіб застосування**

Спринцівки застосовуються в лікувальних установах широкого профілю, а також для індивідуального використання в домашніх умовах.

Перед застосуванням балон спринцівки потрібно продезінфікувати шляхом кип'ятіння в дистильованій воді протягом  $(30 \pm 5)$  хвилин, або балон спринцівки і наконечник витримати в 3% розчині перекису водню протягом  $(80 \pm 5)$  хвилин з подальшим ополіскуванням в проточній воді.

Перед застосуванням спринцівки наконечник змазують нейтральним жиром (вазеліном, ланоліном).

Спринцовка повинна контактувати з лікарськими розчинами не більше 30 хвилин.

Після застосування спринцовку промивають гарячою водою для видалення лікарського розчину і просушують.

## **Умови зберігання**

Зберігання спринцівки має здійснюватися в приміщенні при температурі від +5 °С до +25 °С на відстані не менше 1 м від нагрівальних приладів.

Спринцівки після транспортування при мінусових температурах необхідно витримати в упаковці протягом доби в нормальних кімнатних умовах.

Не допускати впливу на спринцівку кислот, лугу, розчинників і інших речовин, що руйнують вироби.

### **Упаковка**

По 1 спринцівки в упаковці.

### **Виробник**

ТОВ "Поліком", Україна.