

Склад

Це серологічний метод аналізу зразків крові, як і ІФА, СІТО TEST COVID-19 виявляє наявність IgM і IgG до коронавірусної інфекції, зазвичай IgM можна виявити за 7го дня після появи перших симптомів.

Спосіб застосування

1. Підготувати всі необхідні для дослідження матеріали: комплектуючі тесту і годинник.
2. Тест-касету, буфер необхідно витримати при кімнатній температурі стільки часу, щоб їх температура дорівнює кімнатній (15-30 °С).
3. Відкрити запаяний пакет, дістати тест-касету і розмістити її на столі з горизонтальною поверхнею. Слід виконати тестування протягом 1 h (ч) після відкриття пакета.
4. Провести забір зразка капілярної крові з пальця. Для цього необхідно:
5. Помити руки теплою водою з милом або протерти палець спиртовою серветкою, висушити.
6. Масажувати руку в напрямку кінчиків середній або безіменний пальці, не торкаючись місця проколу.
7. Проколоти шкіру стерильним ланцетом, витерти нової спиртової серветкою першу краплю крові.
8. М'яко масажуючи руку від зап'ястя до пальців, досягти утворення круглої краплі крові над місцем проколу;
9. Відібрати одноразовою піпеткою зразок крові до межі наповнення (приблизно 10 µl (мкл)), зазначеної на піпетці, уникаючи утворення бульбашок повітря.
10. Внести відібраний зразок крові в лунку (S) на тест-касеті. Потім додати 2 краплі буфера лунку (B) і почати відлік часу.
11. Облік результату провести через 10 min (хв) після внесення зразка. Чи не брати до уваги результат по завершенню 20 min (хв).

Умови зберігання

Тест можна зберігати і транспортувати при температурі від 2 °С до 30 °С. Тест зберігає стабільність до закінчення терміну придатності, зазначеного на герметичній упаковці. Тест повинен знаходитися в герметичній упаковці до моменту використання. Не заморожувати. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

Упаковка

1 набір для швидкого проведення тесту.

Виробник

ТОВ "Фармаско", Україна.