

## **Особливості**

- міцний до вигину, зламу, не викликає алергії завдяки матеріалу виробництва;
- гостро заточений тригранний центральний спис мінімізує болючість проколу, бічні обмежувачі фіксують його глибину;
- оптимальний розмір леза дозволяє за 1 прокол мінімально травмувати тканини та отримувати достатній об'єм крові.

## **Призначення**

Скарифікатор (ланцет) є металевою пластиною з центральним гострим зубцем у вигляді списа. Застосовується для проколювання шкіри пальця при заборі проб капілярної крові для клінічних досліджень.

## **Спосіб застосування**

1. Перевірити цілісність індивідуальної упаковки.
2. Обробити місце пунції 70% ізопропіловим спиртом та дати висохнути.
3. Розкрити індивідуальну упаковку, дістати скарифікатор.
4. Зробити пункцію.

## **Умови зберігання**

Зберігати у чистому та темному місці.

## **Упаковка**

Скарифікатор в індивідуальній упаковці, по 200 шт в картонній упаковці.

## **Виробник**

ТОВ "ІГАР", Україна.