

Склад

Стерильний ізотонічний розчин, що містить борну кислоту, ЕДТА (едетат динатрію), бора́т на́трію і на́трію хлорид.

Активні компоненти:

- DYMED (поліамінопропіл бігуанід) - 0,0001%.
- HYDRANATE (гідроксиалкілфосфонат) - 0.03%.
- Поллоксамін – 1%.

Опис

«ReNu® MultiPlus» - універсальний розчин, який призначений для щоденного очищення, видалення протеїнових відкладень, промивання, хімічної (не термічної) дезінфекції та зберігання м'яких (гідрофільних) контактних лінз.

Особливості

- Універсальний розчин забезпечує постійне зволоження поверхні лінзи та тривалий комфорт.
- «ReNu® MultiPlus» очищає, розпушує і видаляє плівку, інші відкладення або забруднення, що утворилася в процесі носіння м'яких контактних лінз.
- Розчин знищує патогенні мікроорганізми на поверхні лінзи.
- DYMED (PHMB – поліамінпропіл бігуанід) – висока ефективність дезінфекції щодо бактерій, грибків та Acanthamoeba, що забезпечує безпечне носіння.
- Поллоксамін видаляє поверхневі забруднення та відкладення, що утворюються під час носіння, забезпечуючи чіткий та стабільний зір.
- ЕДТА - HYDRANATE розщеплює довгі молекули білків на дрібніші фрагменти, які надалі можуть бути змиті з поверхні лінзи сльозою чи розчином.

Рекомендації до вживання

Розчин використовується для промивання, зберігання та зволоження лінз перед надяганням.

Особливості застосування

У цьому розчині відсутні вологоутримуючі та зволожуючі компоненти. Якщо ви спостерігаєте деяку сухість, застосовуючи цей розчин, то додайте у свій набір засобів догляду за контактними лінзами спеціальні зволожуючі краплі.

Спосіб застосування

Час дезінфекції – 4 години.

Розчин застосовується всім видів м'яких контактних лінз.

Термін придатності

Термін використання після відкриття – 3 місяці.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 240 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній упаковці.

Виробник

BAUSCH LOMB IOM S.P.A, Італія.