

Опис

o.b. ProComfort з новою технологією Smooth Technology для більш гладкої поверхні тампона мають унікальне шовковисте покриття SilkTouch, що забезпечує максимально легке введення. Спіралеподібні жолобки FluidLock забезпечують надійний захист ефективно направляючи рідину всередину тампона. Все це робить невеликі тампони o.b. ProComfort легкі та зручні у використанні навіть у дні з незначними виділеннями, або коли ви тільки починаєте користуватися тампонами.

o.b. ProComfort зі ступенем поглинання Mini та Normal рекомендуються у таких випадках:

- Для жінок та дівчат, які тільки починають користуватися тампонами.
- У дні із незначними чи середніми виділеннями.
- Для дівчат, менструальні виділення яких невеликі у зв'язку з використанням гормональних контрацептивів.
- Для мам, які вперше пояснюють своїй дочці, як користуватись тампонами.

Як використовувати

1. Вимий руки. Розірви захисну оболонку, щоб витягти безаплікаторний тампон.
2. Потягніть внутрішню трубочку аплікатора із зовнішньої на себе до характерного «кліку» (див. схему), щоб подовжити аплікатор тампона до його повного розміру.
3. Великим і середнім пальцем візьми аплікатор за зовнішню трубочку і розташуй закруглений кінець аплікатора біля входу в піхву
4. Обережно розсунь статеві губи пальцями вільної руки. Вагінальний отвір розташовано між отвором сечівника і анальним отвором.
5. Обережно введи верхню частину аплікатора у піхву під нахилом, поки пальці не торкнуться тіла.
6. Вказівним пальцем введи внутрішню трубочку аплікатора у зовнішню. Тепер тампон знаходиться у правильному положенні, так що ти його не відчуваєш
7. Видалити аплікаторні трубочки. Нитка повернення тампона має залишатися зовні. Переконайся, що ти видалила обидві трубочки аплікатора, потім викинь їх (не змивай аплікатор у каналізацію, оскільки він пластиковий) і вимий руки.

Увага! Упаковка містить у собі листівку з важливою інформацією про рідкісну та небезпечну реакцію - менструальний СТШ. Будь ласка, прочитайте та збережіть її (важливо для Вашого здоров'я та особистої гігієни).