

## Опис

o.b.® ProComfort® забезпечують комфортне введення та надійний захист завдяки унікальному\*\* шовковистому покриттю SilkTouch™, спіралеподібним жолобкам FluidLock™ та новій технології Smooth Technology\* для ще більш гладкої поверхні тампона. o.b.® ProComfort® Mini є найкращим варіантом для початківців, а також у дні зі слабкими виділеннями.

\* Технологія «Смуз Текнолоджи» для більш гладкої поверхні тампона в порівнянні з попередньою версією даного продукту

\*\* За даними дослідження «Technical Justification», проведеного ТОВ «Джонсон&Джонсон» у листопаді 2013 року

## Як використовувати

1. Вимий руки. Розірви захисну оболонку, щоб витягти безаплікаторний тампон.
2. Потягніть внутрішню трубочку аплікатора із зовнішньої на себе до характерного «кліку» (див. схему), щоб подовжити аплікатор тампона до його повного розміру.
3. Великим і середнім пальцем візьми аплікатор за зовнішню трубочку і розташуй закруглений кінець аплікатора біля входу в піхву
4. Обережно розсунь статеві губи пальцями вільної руки. Вагінальний отвір розташовано між отвором сечівника і анальним отвором.
5. Обережно введи верхню частину аплікатора у піхву під нахилом, поки пальці не торкнуться тіла.
6. Вказівним пальцем введи внутрішню трубочку аплікатора у зовнішню. Тепер тампон знаходиться у правильному положенні, так що ти його не відчуваєш
7. Видалити аплікаторні трубочки. Нитка повернення тампона має залишатися зовні. Переконайся, що ти видалила обидві трубочки аплікатора, потім викинь їх (не змивай аплікатор у каналізацію, оскільки він пластиковий) і вимий руки.

**Увага!** Упаковка містить у собі листівку з важливою інформацією про рідкісну та небезпечну реакцію - менструальний СТШ. Будь ласка, прочитайте та збережіть її (важливо для Вашого здоров'я та особистої гігієни).