

Склад

В 100 мл спрею Квікс міститься 84,6 мл натуральної океанічної води і 15,4 мл очищеної води. Вміст солі — 2,6%. Розчин прозорий без запаху і безбарвний.

Опис

Квікс — це назальний спрей, що містить воду Атлантичного океану в оптимальній концентрації (вміст солі — 2,6%). Ця вода містить комбінацію цілющих мінералів і мікроелементів.

Квікс зумовлює природну допомогу закладеним носовим ходам та навколоносовим пазухам, а також зволожує слизову оболонку носа, що особливо важливо для підтримки здорового стану дихальної системи.

Яким чином Квікс полегшує носове дихання:

- ефективно зменшує набряк носових ходів та усуває закладеність носа;
- активно очищає порожнину носа та навколоносові пазухи;
- зволожує слизову оболонку носа;
- завдяки своїм властивостям Квікс відновлює функції носа і тим самим знижує ризик
- ускладнень (синусит, отит) та полегшує подих.

Квікс має такі переваги:

- містить тільки натуральні компоненти;
- безпечний при тривалому використанні;
- не викликає звикання;
- не містить консервантів.

Показання

Щоденна гігієна і догляд за носовою порожниною для підтримки захисних властивостей слизової.

М'яке очищення слизової оболонки носа.

Полегшення симптомів сухості і подразнення слизової оболонки носа.

Підготовка порожнини носа перед проведенням лікувальних заходів.

Полегшення сякання при закладеності носа.

Протипоказання

Гіперчутливість (алергічні реакції) до морської води.

Застереження

Використовувати з обережністю після оперативних втручань і травм в області носа, медичний виріб слід застосовувати тільки після консультації лікаря.

Спосіб застосування та дози

Завжди використовуйте Квікс згідно з інструкцією для застосування. Якщо виникли сумніви, слід проконсультуватися з лікарем або фармацевтом.

На початку використання можливе відчуття печіння.

Дозування:

- Діти: 1-2 впорскування у кожний носовий хід 2-3 рази на добу.
- Дорослі: 1-3 впорскування у кожний носовий хід 2-3 рази на добу.

Тривалість використання Квікс не обмежена.

Використання спрею.

Слід зняти ковпачок. Підготуйте спрей до застосування, кілька разів натиснувши на манжету наконечника до досягнення дрібного аерозольного розпилення. Після цього спрей готовий до використання.

Вставте наконечник у носовий хід та натисніть на манжету по обидва боки наконечника.

Після кожного використання очистіть наконечник та закрийте ковпачком.

Наконечник забезпечує дозований потік та рівномірний розподіл спрею, який зволожує та очищає слизову оболонку носа.

Слід проконсультуватися з лікарем щодо тривалості використання Квікс. Не викликає звикання.

Термін придатності

Після першого розкриття упаковки слід використовувати протягом 6 місяців.

Умови зберігання

Зберігати при кімнатній температурі, в недоступному для дітей місці. Не застосовувати медичний виріб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Упаковка

По 30 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Pharmaster Zone Industrielle de Krafft, Франція.