

Склад

Натрій-магній-цинк, сіль метілвенілефірмалеїнової кислоти, вазелін, камедь, рідкий парафін, кремній, менти лактат, ментол, ароматизатор, барвник.

Опис

Крем дозволяє протезу максимально міцно триматися на яснах, щоб уникнути дискомфорту в будь-якій ситуації.

Фармакотерапевтична група

- використання продукту абсолютно безпечно, не викликає алергії і не має протипоказань і побічних ефектів;
- крем виконаний з екологічно чистих речовин, які повністю сумісні з будь-яким типом емалі і не порушують кислотно-лужний баланс;
- продукт не містить цинк;
- крем допомагає зубного протезу дуже міцно і ґрунтовно триматися в порожнині рота, дозволяючи Вам приймати будь-яку їжу і напої, включаючи продукти, які раніше були небажані (наприклад, горіхи).

Спосіб застосування та дози

Нанесення:

1. Очистіть і висушіть зубний протез.
2. Нанесіть невелику кількість крему короткими смужками не дуже близько до країв зубних протезів.
3. Прополощіть рот теплою водою перед установкою зубного протеза.
4. Вставте протез в ротову порожнину, плавно притисніть і зімкніть щелепи для кращої фіксації на кілька секунд.
5. Не наносіть частіше ніж один раз на день.

Витяг:

1. Прополощіть рот теплою водою.
2. Повільними погойдуються рухами витягніть протез з порожнини рота.
3. За допомогою теплої води і зубної щітки з м'якою щетиною видаліть залишки крему з поверхні зубних протезів і з порожнини рота.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С, в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 70 мл в тубі, по 1 тубі в картонній коробці.

Виробник

Stafford Miller, Ірландія.