

Склад

Натрію карбонат, натрію бікарбонат, натрію перборат, ПВК-30, барвник блакитний, лимонна кислота, натрію лаурілсульфоацетат, калію моноперсульфат, тетрацетілетілендіамін, натрію бензоат, протеолітичні ферменти, ефірну олію м'яти перцевої, поліетиленгліколь 8000, поліметилсилоксан.

Опис

Засіб для щоденного очищення знімних зубних протезів, яке допомагає видалити наліт і стійкі плями і додає свіжість вашим зубних протезів.

Якщо ви прагнете до глибокого очищення, але не хочете замочувати протез на ніч, таблетки для очищення зубних протезів КорегаБіо Формула - продукт, який вам потрібен. Всього за 3 хвилини вони на 99,9% зменшують число бактерій, що викликають неприємний запах з рота. При використанні відповідно до інструкції по застосуванню таблетки для очищення зубних протезів Корега Біо допомагають видалити стійкі плями і зменшити наліт, роблячи ваш зубний протез чистішим і свіжим, щоб ви змогли стати ближче з найважливішими для вас людьми. На відміну від звичайних зубних паст, таблетки Корега не містять абразивів, тому вони очищають зубні протези не дряпаючи їх, залишаючи менше можливостей для зростання небажаних бактерій та інших мікроорганізмів.

Властивості

- на 99,9% зменшує число бактерій;
- видаляє наліт і стійкі плями;
- надає свіжість вашим зубних протезів;
- чи не дряпає зубний протез при очищенні.

Спосіб застосування та дози

1. Покладіть таблетку у склянку з теплою (не гарячою) водою, щоб отриманий розчин повністю покривав зубний протез.
2. Замочіть зубний протез на 3 хвилини.
3. Почистіть протез м'якою зубною щіткою з використанням розчину.
4. Ретельно обполосніть протез проточною водою.
5. Розчин, що залишився після використання, слід негайно вилити.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25°C.

Упаковка

По 30 таблеток в упаковці.

Виробник

Stafford Miller, Ірландія.