

Склад

Натрію карбонат, натрію бікарбонат, натрію перборат, ПВК-30, барвник блакитний, лимонна кислота, натрію лаурілсульфоацетат, калію моноперсульфат, тетрацетілетілендіамін, натрію бензоат, протеолітичні ферменти, ефірну олію м'яти перцевої, поліетиленгліколь 8000, поліметилсилоксан.

Характеристика

Таблетки Корега містять ряд активних компонентів, які очищають, дезінфікують зубний протез і надають дезодорує.

Завдяки активному догляду, регулярне застосування таблеток Корега допомагає продовжити термін використання протеза.

Унікальна формула таблеток Корега дозволяє видалити залишки їжі в місцях, недоступних при механічному очищенні протеза щіткою.

Постійне застосування таблеток Корега сприяє виведенню з поверхні протеза таких складних забруднень, як наліт від кави і тютюну.

Завдяки антисептичним компонентам, таблетки Корега дезінфікують зубний протез, а розміщення протеза в розчині на 8 годин є відмінним способом стерилізації протеза.

Таким чином, регулярне застосування таблеток Корега для очищення зубних протезів дозволяє продовжити термін служби зубного протеза, зберегти його первісний колір. Крім того, знизити ризик розвитку запалень і подразнень ясен і слизової оболонки ротової порожнини при використанні зубного протеза.

Інструкція

Перед застосуванням таблеток Корега необхідно ретельно очистити зубний протез від залишків їжі за допомогою зубної щітки.

Зубний протез опускають в свіжо приготовлений розчин препарату (для приготування розчину беруть 1 склянку теплої води і одну таблетку Корега).

Рекомендується залишити протез в розчині на 10-15 хвилин для очищення, при необхідності стерилізації протеза його залишають в розчині на всю ніч.

Після обробки розчином, протез слід ретельно промити проточною водою протягом декількох хвилин і висушити за допомогою паперової серветки.

Препарат категорично заборонено використовувати для обробки протезів в порожнині рота.

Показання

Для очищення і дезінфекції знімних зубних протезів

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Упаковка

По 30 таблеток в упаковці.

Виробник

Stafford Miller ltd, Ірландія.