

Склад

- бікарбонат натрію;
- калію кароат;
- натрію перборат;
- лимонна кислота;
- натрію лаурисульфат;
- ароматизатор;
- CI 73015.

Опис

Таблетки для очищення зубних протезів Протефікс містять активний кисень, завдяки якому швидко і ґрунтовно очищають зубні протези, не руйнуючи при цьому матеріал зубних протезів. Таблетки Протефікс надовго зберігають свіжий запах у роті.

Протипоказання

При індивідуальній чутливості до компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози

Розчинити 1 таблетку в половині склянки теплої води. Попередньо очищений протез покласти в стакан на 15 хв і потім ретельно промити протез під проточною водою, що гарантує чистоту і свіжість протезів.

Умови зберігання

Зберігання при температурі не вище 25 °С, в сухому і недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 66 таблеток в упаковці.

Виробник

Квайссер Фарма ГмбХ і Кою КГ, Німеччина.