

## **Склад**

Бікарбонат натрію, потрійна калієва сіль пероксомоносульфата, гідрогенсульфат і сульфату, натрію перборат, лимонна кислота, лаурилсульфат натрію, м'ятна олія, ментолове масло, С.І. 73000.

## **Властивості**

Продукт має високу якість, простоту у використанні, гарантовано подарує відмінний результат і суттєво спростить процес очищення знімних протезів.

Таблетки миттєво розчиняються у звичайній воді, фарбуючи її в блакитний відтінок, при цьому насичуючи концентрованими окислюючими мікроелементами, здатними ефективно розчинити наліт і видалити органічні залишки.

Засіб має дезінфікуючі і антибактеріальними властивостями, і абсолютно безпечно в застосуванні.

## **Спосіб застосування та дози**

1. Очищувальну таблетку разом з протезом покласти в келих з теплою водою.
2. Через 10 хв. протез стає чистим, гігієнічним і свіжим.
3. Протез можна залишити в очисному розчині на ніч.
4. Перед установкою протеза його необхідно промити в проточній воді.

## **Термін придатності**

3 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати у недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.

## **Упаковка**

По 32 таблетки в упаковці.

## **Виробник**

Др. ТайссНатурваренГмбХ, Німеччина.