

## **Опис**

Фіксуєчий крем Protefix (Протефікс) рекомендується для надійної фіксації при підвищеному і нормальному слиновиділення. Він легко наноситься, зберігає свої властивості під впливом гарячої і холодної їжі, позбавлений смаку і запаху, не змінює смак їжі і напоїв, не робить негативного впливу на шлунок.

Не змивається слиною і рівномірно розподіляється по всій прилеглий до ясен поверхні. Фіксуєчий крем Protefix (Протефікс) дуже економічний: упаковки вистачає приблизно на 2 місяці.

## **Особливості**

- наноситься на вологі зубні протези;
- сильна і тривала фіксація зубних протезів (не менше 12 годин);
- рекомендується при підвищеному слиновиділення;
- перешкоджає проникненню їжі під протез;
- не впливає на смак їжі і напоїв;
- зручний і економічний у вживанні;
- ефективність і безпека підтверджена клінічними випробуваннями;
- негайно виникає сильна фіксація;
- ефективна герметизація країв допомагає уникнути проникнення їжі.

## **Спосіб застосування та дози**

Протези і порожнини рота очистити від залишків їжі. На вологі протези нанести тонкою переривчастою лінією фіксує крем Protefix (в поглиблення на зубних протезах верхньої і нижньої щелепи, які потім лягають на ясна).

При необхідності можна нанести смужку фіксуєчого крему і на задню частину ясенний пластини протеза верхньої щелепи. Потім вставте протез і на кілька секунд притисніть його до ясен. Протягом 5 хвилин не приймати їжу.

## **Умови зберігання**

У сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

## **Упаковка**

По 40 мл в тубі, по 1 тубі в упаковці.

## **Виробник**

Квайссер Фарма ГмбХ і Кою КГ, Німеччина.