

Склад

Paraffinum Liquidum, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Petrolatum, Cellulose Gum, Aqua, Silica, Tocopheryl Acetate, Aluminum Hydroxide, Cl 14720

Опис

Крем для фіксації зубних протезів Lacalut Fix з нейтральним смаком забезпечує тривалу і надійну фіксацію протеза протягом всього дня, запобігаючи потрапляння їжі під протез. Вітамін Е доглядає за яснами, рідкий парафін і вазелін зволожують слизові, а з'єднання алюмінію робить ясна менш пухкими. Крем не змінює смак їжі. Підходить для повних і часткових протезів.

Показання

Крем для фіксації зубних протезів Lacalu.

Спосіб застосування та дози

Крем наноситься точково або тонкими смужками на чистий протез, але не дуже близько до краю протеза. Після нанесення крему протез необхідно міцно притиснути до ясен на кілька секунд. Після установки протеза рекомендується утриматися від прийому їжі і води на перші півгодини. Після застосування щільно закрийте кришку тубика, щоб крем не засох.

Упаковка

40 г в тубі в картонній коробці

Виробник

Др. Тайсс Натурварен Гмбх, Німеччина