

Склад

Виготовлені з полімерного матеріалу з заданими механічними характеристиками. Якір контрацептиву має форму замкнутого кільця. У площині кільця розміщений внутрішній стрижень, на який намотаний мідний зі срібною серцевиною дріт. На якорі змінюється петля для кріплення монофіламентної трансцервіккальної нитки. Максимальний діаметр - 19 мм².

Ступінь чистоти срібла в дроті не менше 99,98%. Номінальна площа активної медьсодержащего поверхні 255 мм². Вміст срібла в дроті зі срібною серцевиною не менш 9,3%.

ВМС поставляється в паперово-друкованому пакеті в комплексі з полімерною вступною трубкою і поршнем. На вступній трубці встановлено пересувний полімерний обмежувач для позначення глибини введення і площині якоря контрцептіва.

Стерелізація - радіаційна або газова - оксидом етилену.

Показання

Бажання жінки оберегти себе від вагітності.

Лікування і профілактика синдрому Ашермана. Як посткоїтальний засіб ВМС може вводиться протягом 3-4 днів після незахищеного статевих акту.

Рекомендовані терміни введення ВМС:

- будь-який день менструального циклу (краще з 4-19 день);
- безпосередньо після неускладненого медичного аборт, здійсненого методом вакуум-аспірації або кюретажу;
- після закінчення інволюції матки (через 5-6 тижнів після неускладнених пологів) в т.ч. на тлі лактаційної аменореї;
- відразу після вилучення ВМС, термін використання якого закінчився, при бажанні жінки продовжити внутрішньоматкову контрцепцію;
- з метою посткоїтальної контрацепції на - 3-4 день після незахищеного статевих акту.

Протипоказання

Внутрішньоматкова контрацепція абсолютно протипоказана при вагітності (підозра чи підтвердження), злоякісних захворюваннях жіночих статевих органів,

запальних процесах органів малого таза, при кровотечах із статевих органів невстановленої етіології, при аномаліях розвитку матки, міомі більше 8 тижнів, ендометріозі будь-якої локалізації, алергії на мідь, хвороба Вільсона. З обережністю (після проведення оцінки ризиків / переваг) необхідно застосовувати ВМС при високому ризику розвитку захворювань, що передаються статевим шляхом (наявність декількох сексуальних партнерів), анемії (гемоглобін менше 90 г / л), у родили жінок, при захворюваннях крові, у пацієнток з наявністю в анамнезі позаматкової вагітності.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не виявлено. При необхідності діагностичного і терапевтичного опромінення медичний персонал повинен бути проінформований за наявності ВМС. У деяких випадках може знадобитися видалення контрацептиву.

Особливості застосування

Адаптація до ВМС

У період адаптації організму пацієнтки до ВМС (3-4 місяці) можливі зміни менструального циклу. Менструальні кровотечі можуть супроводжуватися тягнучим болем внизу живота або хрестової області, яка, як правило, швидко затихає. З метою підвищення прийнятності ВМС і скорочення періоду адаптації рекомендується:

- проведення ретельного обстеження жінок для виявлення протипоказань до застосування ВМС;
- диференційований підхід до вибору моделі ВМС, виходячи з індивідуальних особливостей організму жінки, планів на дітонародження, часу введення ВМС;
- використання рекомендованої техніки введення внутрішньоматкового засобу і оптимальних термінів для його установки;
- профілактичне призначення антибіотиків;
- призначення інгібіторів простагландіногенезу в перші дні після введення ВМС і протягом трьох перших менструальних кровотеч.

Обстеження пацієнтки перед введенням ВМС

Пацієнтка повинна бути ознайомлена з перевагами, недоліками і можливими ускладненнями методу внутрішньоматкової контрацепції.

Обстеження пацієнтки перед введенням ВМС (об'єм обстеження пацієнтки перед введенням ВМС регламентується національними медичними протоколами і в

різних країнах може відрізнятися):

- клінічне обстеження;
- бактеріоскопічний аналіз вагінальних мазків;
- Пар-мазок (мазок для онкоцитологічного дослідження).

Процедура введення ВМС

Процедура введення ВМС виконується лікарем акушером-гінекологом з дотриманням загальноприйнятих правил асептики.

Після гінекологічного огляду і виключення протипоказань до застосування внутрішньоматкової контрацепції в асептичних умовах вводять дзеркала і трикратно обрабляють шийку матки кульовими щипцями і дещо зводять, стерильним зондом визначають напрямок осі цервікального каналу і довжину порожнини матки. У деяких випадках може знадобитися інструментальне розширення цервікального каналу розширювачами Гегера до №4-4,5.

Процедура підготовки ВМС до введення.

1. Розкрийте упаковку з боку трансцервікальних ниток.
2. Встановіть рухливий обмежувач на відстань, відповідне довжині порожнини матки по зонду.
3. Введіть поршень в трубку до зіткнення з контрацептивом. Для контролю порожнини якоря ВМС поверніть обмежувач на вступній трубці до суміщення плоских поверхонь обмежувача з передбачуваної плоскостю якоря ВМС.

Процедура введення ВМС (Метод "Вилучення")

Зберігаючи тракцію за кульові шипці, як при зондуванні порожнини матки, не докладаючи надмірних зусиль, введення ВМС через канал шийки матки до обмежувача.

Рух здійснюйте вступною трубкою і поршнем одночасно.

Звільнення якоря ВМС з трубки відбувається при зміщенні вступної трубки до упору про кільце поршня.

УВАГА: поршень повинен залишатися нерухомим, підтримуючи контрацептив.

2. Вийміть поршень.
3. Вийміть вступну трубку.

4. Обріжте трансцервікальні нитки так, щоб вони виступали з шийки матки на 1.5-2.5 см.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЧАС З МОМЕНТУ РОЗКРИТТЯ УПАКОВКИ ДО ВВЕДЕННЯ ВМС - НЕ БІЛЬШЕ 7 ХВИЛИН.

Показання для видалення ВМС

ВМС може бути видалена в будь-який день менструального циклу за бажанням жінки.

Обов'язково видалити ВМС після закінчення терміну використання.

При виникненні сумнівів у правильному розміщенні ВМС безпосередньо після введення доцільно витягти контрацептив і ввести новий протизаплідний засіб. Контрацептив повинен бути вилучений при розвитку запальних захворювань органів порожнини таза (ендометрит, сальпінгоофорит і т.п.); стійких порушеннях менструального циклу; розвитку анемії; часткової експульсії ВМС; вираженому больовому синдромі, пов'язаному з наявністю ВМС в порожнині матки; при вагітності на тлі ВМС (питання про пролонгацію вагітності після вилучення ВМС вирішується індивідуально, пацієнтка повинна бути проінформована про те, що ризик мимовільного абортів при наявності ВМС в порожнині матки зростає до 50%).

ПАМ'ЯТКА жінок, які застосовують внутрішньоматковий МЕТОД контрацепції

Ефект методу внутрішньоматкової контрацепції забезпечується присутністю в порожнині матки виробу невеликого розміра - внутриматочного протизаплідний засіб (ВМС).

Період адаптації ВМС триває близько 3-х місяців. Відразу після установки ВМС Вас можуть турбувати незначні кров'яністі виділення із статевих шляхів, невиражені болі внизу живота, які повинні пройти через 2-3 дні.

Протягом 8-10 днів після введення ВМС необхідно утриматися від статевих зв'язків, підвищених фізичних навантажень, занять спортом, відвідування лазні, сауни.

Навіть при гарному самопочутті ви повинні звернутися до лікаря, вводиться ВМС.

Протягом 2-3 місяців після введення в матку ВМС місячні можуть бути більш яскравими і тривалими, іноді відзначаються незначні кров'яністі виділення з статевих шляхів між менструальними кровотечами. Під час менструації доцільно звертати увагу на гігієнічні прокладки, щоб вчасно помітити випадання спіралі разом з виділеннями. Повторні огляди у гінеколога ви повинні пройти через 1, 3,

6 місяців після введення ВМС, потім 1-2 рази в рік протягом всього терміну застосування ВМС.

При використанні ВМС потрібно дотримуватися звичайний гігієнічний режим. Однак, як і при будь-якому сучасному методі запобігання вагітності, можуть виникнути ускладнення:

- затримка місячних (дуже рідко може наступити вагітність);
- болі внизу живота, болі під час статевого акту, підвищення температури тіла, незвичайні виділення зі статевих шляхів (ознаки розвитку запальних захворювань статевих органів);
- через 3 місяці менструації залишаються тривалими, рясними, з'явилася слабкість, відчуття нездужання (ознаки порушення адаптації ВМС).

Побічні реакції

- Збільшення менструальної крововтрати.
- Перед- і міжменструальні кров'яністі виділення.

Термін придатності

Не більше 5 років.

Виробник

ЗАТ "Мед.пред Симург", Белорусь.