

Склад

Саше: Streptococcus salivarius 24SMBc и Streptococcus oralis 89a лиофилизированные (минимальное содержание составляет $125 \cdot 10^9$ КОЕ / г): 1 г, антиагломерант в достаточном количестве.

Флакон: сополимер ПЭГ / ППГ, фруктоза, ПЭГ-14 диметикон, калия цитрат, лимонная кислота, ароматизатор, вода очищенная.

Содержимое упаковки

2 флакона, по 10 мл каждый.

2 пакета-саше, содержит 1,0 г лиофилизированного продукта каждый.

2 оральных распылителя.

Лікарська форма

Наличие нормальной сапрофитной флоры в горле необходимо для здоровья верхних дыхательных путей и организма человека. Изменения сапрофитной флоры могут приводить к фаринготонзиллиту или к другим заболеваниям верхних дыхательных путей и способствовать развитию осложнений в нижних дыхательных путях.

На состав этой чувствительной микробной экосистемы могут влиять различные факторы окружающей среды, физические или химические факторы. Орожермина - это медицинское изделие с механическим воздействием, предназначенное для восстановления естественного биологического барьера, который состоит из автохтонных сапрофитов.

Показання

Орожермина предназначена:

- для профилактики фаринготонзиллярных инфекций;
- после местного и / или системного лечения антибиотиками для улучшения восстановления нормальной сапрофитной флоры в глотке;
- во всех случаях, когда целесообразно улучшить восстановление нормальной сапрофитной флоры в глотке (местное лечение в области глотки, хроническое поражение от вдыхания дыма или раздражающих веществ и т.д.).

Противопоказания

Не использовать медицинское изделие в случае:

- известной гиперчувствительности к компонентам медицинского изделия;
- врожденного или приобретенного иммунодефицита, рака, химиотерапии или пациентам с установленным центральным венозным катетером;
- эндокардита, имеющегося или пережитого в прошлом, и / или сердечных состояний, способствующих развитию эндокардита.

Предостережение

При возникновении каких-либо побочных реакций следует прекратить применение медицинского изделия и обратиться к врачу.

Не глотать.

Медицинское изделие можно использовать в течение 15 дней после приготовления.

Перед применением убедиться в целостности упаковки.

Не использовать медицинское изделие после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Избегать контакта с глазами.

Медицинское изделие предназначено для индивидуального использования.

Не выбрасывать контейнер после его использования в окружающую среду (во избежание загрязнения окружающей среды).

Спосіб застосування та дози

Упаковка содержит 2 флакона, 2 саше и 2 распылителя для горла.

Рекомендуется смешивать один флакон за один раз, используя только один флакон, одно саше и распылитель для горла.

1. Открыть саше вдоль обозначенной пунктиром линии, открыть флакон и высыпать содержимое саше во флакон, стараясь не просыпать содержимое саше.
2. Закрывать флакон крышкой, интенсивно встряхнуть.
3. Открыть флакон и навинтить распылитель после снятия защитного колпачка снизу распылителя, сильно его потянув, но не касаясь внутренней

стороны распылителя.

4. Энергично встряхнуть флакон и снять крышку с распылителя.
5. Перед применением медицинского изделия сделать несколько нажатий для активации распылителя.
6. Используйте изделие в области горла, держа голову вертикально прямо, не вдыхая при применении.
7. Закройте распылитель крышкой и хранить в холодильнике.
8. Перед применением медицинского изделия рекомендуется выдержать его при комнатной температуре примерно 15 минут.
9. Хорошо встряхнуть перед каждым использованием.

Приготовленный раствор следует хранить в холодильнике при температуре 4 ° C.

Медицинское изделие можно использовать в течение не более 15 дней после приготовления.

Взрослым и детям:

по 2 впрыскивания (мин. $4 \cdot 10^9$ КОЕ) один раз в день в течение 30 дней подряд, используя оба флакона. Второй флакон смешивать после использования первого (через 15 дней). Лечение повторяют не менее 3 месяцев или по рекомендации врача.

Умови зберігання

После использования плотно закройте распылитель крышкой.

Нераспакованное медицинское изделие хранить при температуре не выше 15 ° C. Приготовленный раствор следует хранить в холодильнике при температуре 4 ° C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить вдали от источников тепла.

Упаковка

2 флакона, 2 распылителя и 2 саше в картонной коробке.

Виробник

DMG Italia srl.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Виа Лаурентина, км 26,700. Помеция, Рим, Италия.