

Склад

діючі речовини: сухий екстракт цикламену європейського – 2,6% (рідкого 41,6%).

допоміжні речовини: вода, карбомер, натрію гідроокис, метилпарабен, бензоат натрію, тіосульфат натрію.

Опис

Гелеподібна маса від світло-жовтого до жовто-коричневого кольору, без сторонніх включень. Допускається слабовиражена зерниста текстура.

Властивості

Дія «СИНУС ЛІФТ® АКТИВ СПРЕЙ» зумовлена властивостями компонентів, що входять до складу.

Основна передбачувана дія «СИНУС ЛІФТ® АКТИВ СПРЕЙ» в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів.

Екстракт цикламену європейського допомагає відновити комфортне носове дихання завдяки комплексному впливу на слизову оболонку носа. Його ефективність забезпечують біологічно активні речовини – високоочищені сапоніни.

Вони сприяють:

- відновленню прохідності пазух носа;
- усуненню запалення та набряку;
- нормалізації водно-сольового балансу слизової оболонки.

Карбомер виконує роль загущувача і гелеутворювача.

Тіосульфат натрію застосовується як антиоксидант.

Показання

«СИНУС ЛІФТ® АКТИВ СПРЕЙ» застосовується:

- для очищення і захисту фізіологічних функцій слизової оболонки пазух носа при гнійно-запальних процесах;
- для відновлення комфортного носового дихання і функцій слизової оболонки порожнини носа, порушених внаслідок гнійно-запальних змін придаткових пазух носа та активних лікувальних заходів.

Особливості застосування

Курс застосування не більше 7 днів. Під час застосування можливе короткочасне відчуття слабкого печіння у носоглотці, рефлекторні явища у вигляді слинотечі, рідше короткочасні сльозотечі. В жодному з вказаних випадків немає потреби у припиненні застосування.

**УНИКАТИ ПОПАДАННЯ СПРЕЮ В ОЧІ. ІНТЕНСИВНО НЕ ВДИХАТИ
ОДНОЧАСНО З ВВЕДЕННЯМ СПРЕЮ.**

Застосування дітям дозволяється тільки в присутності дорослих осіб.

Для попередження поширення інфекції не слід користуватися одним флаконом кільком особам.

Не можна застосовувати цей засіб особам із індивідуальною підвищеною чутливістю до його компонентів.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом
або іншими механізмами**

«СИНУС ЛІФТ® АКТИВ СПРЕЙ» не впливає на швидкість психомоторних реакцій.

Спосіб застосування та дози

В кожний носовий хід робити по 1-2 вприску спрею.

Рекомендується після цього через 1-2 хвилини нахилити голову донизу на 10-15 хвилин так, щоб кінчик носа був самою нижньою точкою положення голови, та протягом всього цього часу повільно продувати обидві половини носа, не затискаючи ніс. При такому положенні голови вміст всіх пазух носа спорожняється, тому можливі значні виділення з носа. Процедуру проводити не більше, ніж 2 рази на добу.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від +5 °C до +25 °C в захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Не слід застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Упаковка

Спрей у флаконі полімерному місткістю 10 ml (мл) у картонній коробці.

Виробник

ТОВ «Георг Біосистеми».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Вул. Вокзальна, буд. 3, смт Побузьке, Голованівський район, Кіровоградська обл., 26555, Україна.

Адреса виробництва

Вул. Дорожна, 64Б, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51905, Україна.