

Склад

Ліпосомальний розчин, гель алое вера 1%, екстракт ромашки, гіалуронат натрію, вітамін Е – ТП, дінатрій едетат, РНМВ у забуферному ізотонічному розчині.

Не містить хлоргексидину, тимеросалу або хлориду бензалконію.

Опис

Краплі НАВІ ЛІПО – це зволожувальний та відновлюючий офтальмологічний ліпосомний розчин, що складається з фосфоліпідів, які є природними складовими слізної рідини. Субмікроскопічні ліпідні частинки, дисперговані в мікроемульсії, захищають очну тканину, утворюючи тонкий гідрофобний бар'єр, який імітує ліпідний шар, природним чином виявлений у слізній плівці.

Показання

Краплі НАВІ ЛІПО допомагають відновити мікросередовище очної поверхні, змінене підвищеною тенденцією до випаровування, що може бути викликано такими факторами, як нестабільність слізної плівки, травми, носіння контактних лінз, тривале опромінення комп'ютерними моніторами.

Протипоказання

Невідомі.

Застереження

- У разі подразнення очей, припиніть використання продукту і зверніться до лікаря.
- Не використовуйте, якщо у вас алергія на будь-який компонент продукту.
- Не торкайтеся очей кінчиком пляшки.
- Не вживайте як їжу.
- Не використовувати після закінчення терміну придатності.
- Використайте протягом 28 днів з моменту першого відкриття.
- Стерильний до першого відкриття.
- Після використання пляшку щільно закрийте.

Спосіб застосування та дози

- Збовтайте перед використанням.
- Мийте руки перед використанням пляшки з очними краплями.

- Закапуйте по 1 або 2 краплі в кожне око, за необхідністю, або за рекомендацією фахівця.

Краплі НАВІ ЛІПО сумісні з усіма типами контактних лінз.

Умови зберігання

Зберігайте в сухому місці, при температурі між 5 та 35 °С. Тримайте подалі від джерел тепла.

Упаковка

По 10 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Novax Pharma SARL, Монако.