

Склад

Диоктил сульфосукцинат натрію, екстракт алое, гіалуронат натрію, гліцерин.

Фармакодинаміка

Іаріклан спрей - м'який засіб, призначений для гігієни вух. Застосовується для видалення залишків вушної сірки та сірчаних пробок та запобігання їх утворенню.

Медичний виріб містить:

- диоктил сульфосукцинат натрію, який ефективно видаляє вушну сірку, особливо у дітей;
- екстракт алое вера, природний інгредієнт, відомий своїми зволожуючими властивостями;
- гіалуронат натрію, відповідальний за підтримання належної гідратації слизових оболонок вуха.

Продукт не містить консервантів, парабенів та пропелентів.

Протипоказання

Підвищена чутливість до інгредієнтів продукту.

Особливості застосування

Не вводьте вушний аплікатор занадто глибоко у вушний канал, щоб уникнути подразнення чи пошкодження.

Не використовуйте Іаріклін спрей у разі перфорації барабанної перетинки, вушних інфекцій або при застосуванні дренажу вуха.

Не використовуйте продукт у разі болю у вусі без консультації з лікарем.

Медичний виріб для вух. Уникайте контакту з очима.

Не ковтайте.

Спосіб застосування та дози

Іаріклін Спрей слід застосовувати відповідно до інструкцій із застосування.

У разі виникнення будь-яких питань, проконсультуйтеся зі своїм лікарем або іншим кваліфікованим медичним працівником.

Продукт призначений для дітей старше 1 року та дорослих.

Дозування:

Регулярна гігієна вух: користуйтеся 1-2 рази на тиждень.

Видалення вушної сірки та сірчаної пробки: використовувати щодня протягом 3-4 днів.

Спосіб застосування:

Перед використанням струсіть флакон, а потім введіть аплікатор у зовнішній вушний канал і натисніть кілька разів, поки не з'явиться рідина. Введіть належну дозу. Зачекайте приблизно одну хвилину і введіть фізіологічний розчин солі у вушний канал, щоб промити вухо. Повторіть цю дію з другим вухом. Форма спрею забезпечує рівномірне розпилювання та точне дозування.

Після використання промийте аплікатор під проточною водою.

З міркувань гігієни та уникнення можливого перенесення інфекції рекомендується використовувати один флакон для однієї людини.

Задля безпеки не слід використовувати аплікатор не за призначенням.

Не використовуйте пошкоджений аплікатор.

Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігайте в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігайте у недоступному для дітей місці.

Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці та етикетці.

Виробник

Гофарм Сп.з.о.о.Сп.к.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Вулиця Гурникув,21/26,Краків 30-819, Польща.