

Склад

100% фармацевтична оливкова олія, 10 ml (мл).

Лікарська форма

Ваксол – медичний виріб для природного пом'якшення та видалення вушної сірки та сірчаних пробок. Зменшує потребу у вимиванні сірчаних пробок за допомогою шприца або полегшує цю процедуру, якщо вона є необхідною.

Ваксол призначений для використання дорослим та дітям віком від 1 року.

Має просту, але унікальну систему, яка дозволяє ввести лише разову дозу продукту у зовнішнє вухо. Спрей легко і зручно використовувати. Розпилювач не допускає надмірного застосування засобу, значно зменшує проливання та зайву витрату продукту. Ваксол запобігає пересиханню шкіри у слуховому проході, знижуючи свербіж і подразнення.

Показання

Ваксол запобігає пересиханню шкіри у слуховому проході, знижуючи свербіж і подразнення.

Застереження

Застосувати спрей згідно з рекомендаціями лікаря.

Флакони спрею рекомендується для використання тільки однією особою.

Утилізувати згідно з нормами, встановленими органами влади.

Не розпиляти поблизу відкритого вогню.

Спрей Ваксол призначений для використання тільки в вушному каналі. Не розпиляти біля очей, носа або рота.

Спосіб застосування та дози

Якщо Ви відкрили новий флакон, необхідно зігріти його в долонях, добре збовтати, а потім натиснути на розпилювач 3-4 рази, поки не з'являться бризки спрею. Виконуючи це, тримайте флакон на відстані від себе. Таким чином Ви активуєте систему та підготуєте спрей до використання.

Для найбільшої ефективності необхідно зігріти флакон в долонях та збовтати його перед застосуванням.

Використовувати один або два рази на тиждень для запобігання утворення сірчаних пробок та для сприяння процесу самоочищення.

У разі наявності сірчаної пробки необхідно застосовувати 1-2 дози спрею двічі на день протягом 4-5 днів. Пробка зруйнується та виділиться самостійно. При підвищеній щільності сірчаної пробки або при анатомічно вузькому зовнішньому слуховому проході може виникнути потреба вимити залишки сірчаної пробки. В цьому випадку рекомендується звернутися до лікаря.

Потягнути м'яко верхню частину вуха або вушну раковину вгору і назад.

Тримавши флакон вертикально, розпилювач слід спрямувати в слуховий прохід і повністю натиснути на дозатор 1-2 рази.

Зробити м'який масаж козелка.

Повторити процедуру з іншим вухом, якщо це необхідно.

Після застосування виробу немає потреби в додатковому промиванні вуха.

Спрей можна застосовувати стоячи або сидячи, тримаючи флакон вертикально.

Після використання дозатор можна зняти та промити в гарячій воді, а потім знову закріпити на флаконі.

Діти

Від 1 року.

Умови зберігання

Завжди зберігати флакон у вертикальному положенні при температурі вище 40 °C

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності

3 роки.

Упаковка

Флаконт 10 мл в картонній коробці.

Виробник

ХЛ Хелскер Лтд.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Пьюер-Офісіс, Тачбрук Парк, м. Ворик CV34 6WE, Велика Британія.