

## **Опис**

Назальний аспіратор Маример бебі® – ідеальне рішення для очищення носа дитини. Форма й м'яка текстура насадки забезпечують дитині максимальний комфорт під час введення в ніс. Фільтр назального аспіратора Маример бебі® має стрічку, яка дозволяє легко змінити фільтр, не забруднюючи руки. Технологія фільтрації забезпечує ефективне очищення носових ходів завдяки високій ефективності відсмоктування. Слиз видаляється без зусилля, накопичується в грушоподібному резервуарі та не стікає назад до носа дитини.

## **Рекомендації щодо застосування**

Вимийте руки. Відкрийте корпус назального аспіратора шляхом від'єднання резервуара [Б] від основи [Г]. Вимийте насадку для носа [А] та резервуар [Б] за допомогою гарячої мильної води, а потім промийте чистою водою. Висушіть. Під'єднайте резервуар [Б] до основи [Г].

## **Очищення носових ходів дитини**

Покладіть дитину на пеленальний стіл і підніміть її голову. Уведіть фізіологічний розчин або розбавлений сольовий ізотонічний розчин у кожну ніздрю дитини для полегшення відсмоктування секрету. Помістіть загубник [Д] собі в рот. Розмістіть назальну насадку [А] у ніздрю дитини та відсмокчіть секрет. Повторіть процедуру на другій ніздрі.

## **Поради після кожного використання**

Відкрийте назальний аспіратор [Б+Г] та видаліть фільтр [В], використовуючи стрічку. Утилізуйте фільтр. Після кожного використання вимийте насадку [А] та резервуар [Б] гарячою мильною водою та промийте чистою водою. Висушіть. Встановіть фільтр Маример [В] в резервуар [Б]. Потім під'єднайте резервуар [Б] до основи [Г]. Зберігайте дитячий назальний аспіратор в упаковці виробника. Перед кожним використанням переконайтесь, що всі компоненти виробу мають задовільний стан. При перших ознаках заносу або пошкодження замініть дитячий назальний аспіратор та/або насадку. Не кип'ятіть. При необхідності, проконсультуйтесь з фармацевтом.

## **Застереження**

Вимийте руки. Відкрийте корпус назального аспіратора шляхом від'єднання резервуара [Б] від основи [Г]. Вимийте насадку для носа [А] та резервуар [Б] за допомогою гарячої мильної води, а потім промийте чистою водою. Висушіть.

Під'єднайте резервуар [Б] до основи [Г].

### **Очищення носових ходів дитини**

Покладіть дитину на пеленальний стіл і підніміть її голову. Уведіть фізіологічний розчин або розбавлений сольовий ізотонічний розчин у кожну ніздрю дитини для полегшення відсмоктування секрету. Помістіть загубник [Д] собі в рот. Розмістіть назальну насадку [А] у ніздрю дитини та відсмокчіть секрет. Повторіть процедуру на другій ніздрі.

### **Поради після кожного використання**

Відкрийте назальний аспіратор [Б+Г] та видаліть фільтр [В], використовуючи стрічку. Утилізуйте фільтр. Після кожного використання вимийте насадку [А] та резервуар [Б] гарячою мильною водою та промийте чистою водою. Висушіть. Встановіть фільтр Маример [В] в резервуар [Б]. Потім під'єднайте резервуар [Б] до основи [Г]. Зберігайте дитячий назальний аспіратор в упаковці виробника. Перед кожним використанням переконайтесь, що всі компоненти виробу мають задовільний стан. При перших ознаках зносу або пошкодження замініть дитячий назальний аспіратор та/або насадку. Не кип'ятіть. При необхідності, проконсультуйтесь з фармацевтом.