

Опис

Аспіратор Отривін Бебі - спеціальний пристрій, що застосовується при ринітах у новонароджених, грудних і дітей молодшого віку для видалення слизових виділень з носа, а також для щоденної гігієни порожнини носа.

Для більшої ефективності перед видаленням слизу рекомендується провести промивання носової порожнини солоним розчином або морською водою, наприклад краплі для зрошення порожнини носа Отривін Бебі.

Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з педіатром.

Спосіб застосування

Приєднайте змінну насадку до корпусу аспілятора.

Вставте наконечник в один з носових ходів дитини.

Обережно втягуйте повітря ротом за допомогою рівномірних вдихів через мундштук.

Повторіть процедуру для іншого носового проходу

Щоб уникнути повторного інфікування використану насадку слід викинути.

В комплекті три змінні насадки.

Змінні насадки також продаються окремо по 10 штук в упаковці.