

Опис

Дитячий носик вимагає щоденного догляду, який в звичайних умовах зводиться лише до прочищення ватним джгутиком. При нежиті така процедура навряд чи полегшить дихання малюка. Діти до 3-х років не вміють самостійно вивільняти ніс від слизу, їм необхідна допомога батьків, які можуть взяти в руки аспіратор і видалити зайву слиз. З чистим носиком малюкові легше смоктати мамині груди і спокійніше спати.

Аспірація - найбільш швидкий і простий спосіб видалення слизу, що дозволяє підвищити ефективність лікарських препаратів від нежитю (попередньо очищає дитячий ніс), скоротити дози лікарських засобів і терміни одужання.

Аспіратор NoseFrida - простий у використанні і безпечний аспіратор для самих маленьких носиків (від народження до 3 років), що дозволяє швидко і ефективно очистити ніс від слизу.

Розроблено та протестовано лікарями-отоларінгологами. З нами в МОЗ України.

Особливості

- ефективний, простий і безпечний;
- розроблений, проведений і протестований під контролем лікарів, педіатрів і отоларінгологів;
- сертифікований як безпечне пристрій: не травмує слизову носа навіть при раптовому русі дитини;
- має антибактеріальний фільтр (в комплекті 3 фільтра). Додатково можна придбати комплект з 20 змінних фільтрів.

Правила догляду та експлуатації

- промивайте теплою проточною водою і рідким миючим засобом всі частини аспілятора після кожного використання. Обполосніть і залиште частини сохнути. Заменіте антибактеріальний фільтр;
- перед застосуванням закапайте кілька крапель сольового розчину (фізрозчин, Аквамаріс і т.п.) для розм'якшення слизу;
- помістіть прилад NoseFrida в зовнішній ніздрю і всмоктуючими рухами видаліть слиз;
- якщо необхідно, повторюйте процедуру до повного очищення носової порожнини;

- не рекомендується вставляти аспіратор глибоко в носову порожнину малюка, щоб уникнути травм.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

Аспіратор в контейнері.

Виробник

Nasalprodukter Sverige AB, Швейцарія.