

Опис

Ексклюзивні тест-смужки Contour Plus запатентовані відомої швейцарської компанією. Їх хімічний склад забезпечує високу точність вимірювань. На показник рівня глюкози не впливає кисень, мальтоза і галактоза в крові. Вироби пройшли сертифікацію в Україні, якість відповідає європейським стандартам. Не вимагають ручного кодування!

Тест показує результат з мінімальною похибкою навіть при дуже низькій концентрації цукру в крові. Точність результатів перевищує світовий стандарт ISO.

Смужки підходять для використання з глюкометрами Contour Plus і Contour Plus ONE. Щоб аналіз проходив коректно, вироби потрібно використовувати тільки з приладами оригінальної торгової марки.

Спосіб застосування

1. Промийте руки з милом або протріть їх спиртовою серветкою.
2. Дістаньте тест-смужку з коробки і вставте в спеціальний роз'єм глюкометра (торкатися до смужці можна з будь-якого краю).
3. Помістіть ланцет в пристрій для проколювання (ви повинні почути клацання).
4. Зніміть ковпачок з ланцета, накрийте голку наконечником.
5. Прикладіть край ланцета до пальця і натисніть на кнопку, роблячи прокол (рекомендуємо збоку подушечки пальця, де найменш чутлива шкіра).
6. Масажуйте палець від заснування до краю, поки не вийде крапля крові.
7. Краєм тест-смужки торкніться краплі.
8. Через кілька секунд ви побачите результат тесту на екрані.
9. Протріть палець спиртовою серветкою.
10. Дістаньте тест-смужку з глюкометра і викинете в сміттєвий бак.

Умови зберігання

- Зберігати вироби допускається тільки в оригінальному флаконі;
- не використовувати тест-смужки, чий термін придатності перевищено;
- зберігати і перевозити при температурі від 0 °С до 30 °С;
- кожна смужка є одноразовою, після одного застосування стає непридатною;
- тримати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 25 тест-смужки в упаковці.

Виробник

Байер Консьюмер Кер АГ, Швейцарія.