

Опис

Окуляри для фототерапії Білірубішка застосовуються при процедурі фототерапії новонароджених для захисту очей від ультрафіолетових променів.

Захисні подушки захищають від проходження променів на 100%.

Окуляри застосовуються для дітей з народження, в тому числі передчасно народжених.

Вони виготовлені з еластичного матеріалу і мають Y-подібну форму, завдяки чому добре фіксуються.

Переваги

- На 100% захищають очі від УФ променів.
- Виготовлені з еластичного матеріалу.
- Комфортні для дитини.
- Добре фіксуються завдяки Y-подібної форми.
- Стерильні.

Спосіб застосування

1. Дістаньте окуляри для фототерапії Білірубішка зі стерильним упаковки.
2. Окуляри повинні бути розташовані захисної подушкою до очей дитини.
3. Розмістіть окуляри так, щоб вони рівномірно і повністю покривали очі дитини.
4. Налаштуйте окуляри за допомогою еластичного пов'язки з липучками.
5. Переконайся, що розмір очок підібрано оптимально.
6. Окуляри призначені для одноразового індивідуального використання.

Виробник

MEDBAR TIBBI MALZEMELER, Туреччина.