

Опис

Універсальні набори пластирів з подушечкою на тканинній, полімерній, поліуретановій, нетканій основах широкого спектру використання. Форма випуску стріп. Також може випускатися у рулонах на полімерній чи тканинній основах різного розміру (Економічний).

Показання

Призначений для фіксації пошкоджених пальців, при наданні першої допомоги в разі дрібних ран, подряпин, порізів.

Спосіб застосування

Перед використанням вийняти пластир з паперового пакету та зняти захисну плівку, після чого подушечкою прикласти до рани, а краї пластиру притиснути до шкіри. Пластир може залишатись на шкірі протягом доби.

Протипоказання

Гіперчутливість до основи пластиру, клеючої речовини.

Побічні ефекти

Подразнення шкіри у місці приклеювання.

Застереження

Пластир не можна використовувати на відкритих і післяопераційних ранах, на подразненій шкірі. В разі появи сильного подразнення пластир необхідно зняти.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 5°C до 35°C.

Виробник

ТОВ «КАЛИНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ», 04128, м. Київ, вул.
Садова, 16/19, Україна

Юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів тік, буд. 35А, Україна