

Опис

Експрес-тест Express Test мультипанель наркотики

Мультипанель виявлення 5 видів наркотичних речовин: опіати, амфетамін, екстезі, марихуана, метамфетамін.

Експрес-тести визначення наркотиків - це одноразові пристрої, які можуть виявити факт вживання наркотиків у домашніх умовах, без спеціальної апаратури. Точність результату таких тестів сягає 95-99%.

Як працюють діагностичні тести на визначення наркотиків у сечі:

- При вживанні наркотиків в організмі людини утворюється метаболіт, який можна виявити за допомогою тесту відповідно до речовини, що вживається. Виявлення наркотичних речовин та їх метаболітів ґрунтується на специфічній взаємодії антиген-антитіло шляхом латерального хроматографічного проточного імуноаналізу.
- Метаболіти виводяться із сечі протягом певного часу після вживання, тому за допомогою швидких тестів ExpressTest можна визначити не просто стан сп'яніння, а сам факт вживання наркотику.

Вплив наркотиків

- Опіати: недовге почуття ейфорії, потім розслабленість, млявість, сонливість, втома, уповільнення дихання та серцебиття, зниження спраги та апетиту, зниження чутливості до болю та інші.
- Екстезії: ейфорія, зниження страху, підвищення рівня довіри та відкритості.
- Метамфетамін: ейфорія, сексуальне збудження, працездатність, приплив сил.
- Марихуана: напади радості, паніки та параної, прискорене серцебиття, втрата рівноваги, труднощі мислення.
- Амфетами: дія на психіку починається через 30-60 хвилин. Людина відчуває покращення настрою, приплив сил, неймовірну розумову та фізичну працездатність.

Спосіб застосування

Занурте на кілька секунд тест-смужку в сечу або слину і вже через 5 хвилин Вам буде відомий результат.

Оцінка результатів:

- У кожному тесті є тестова та контрольна зони, де при негативному результаті з'являються дві червоні або рожеві лінії: тестова та контрольна (наркотика немає).
- Якщо в сечі знаходяться метаболіти наркотичних речовин, тестова лінія стає невидимою, з'являється лише одна червона чи рожева контрольна лінія (наркотик є).

Умови зберігання

зберігати при температурі від +2 до +30°C.