

## **Склад**

0,05% гіалуронат натрію, карбомер, гліцерин, ліпідний компонент, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

## **Рекомендації щодо застосування**

Зволоження очей та повік.

## **Опис**

### **Що собою представляє Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід?**

Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід — це стерильний офтальмологічний зволожуючий розчин, що містить гіалуронову кислоту 0,05% (у вигляді гіалуронату натрію), карбомер, гліцерин, ліпідний компонент (середньоланцюгові тригліцериди), натрію гідроксид і воду для ін'єкцій.

Покращена лікарська форма характеризується дуже високими показниками переносимості, оскільки вона не містить консервантів та буферних розчинів. Цей офтальмологічний спрей випускається у вигляді багатодозової системи без консервантів (PFMD), що є простішою та безпечнішою у використанні. Після відкриття спрей придатний до використання протягом 6 місяців.

### **Для чого застосовується Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід?**

Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід — це засіб для зволоження очей, який підтримує усі три шари слізної плівки, покращуючи зволоження поверхні ока за наявності відчуття сухості в очах. При нанесенні на закриті очі надає відчуття свіжості.

### **Коли слід застосовувати Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід?**

На створення виробу Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід надихнуло вивчення властивостей природної слізної плівки. Цей виріб містить природний зволожувач, гіалуронову кислоту (у вигляді натрію гіалуронату), що є важливим складником здорового ока людини та природної слізної плівки, та дві додаткові зволожувальні речовини: гліцерин та карбомер.

Завдяки вмісту додаткових компонентів ліпідів (середньоланцюгових тригліцеридів) Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід підтримує усі три шара слізної плівки — ліпідний, муциновий і водний.

## **Як застосовувати Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід?**

Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід можна наносити на відкриті та закриті очі (повіки).

Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід при нанесенні на відкриті очі:

Є зволожувальним розчином у формі спрею, який забезпечує інтенсивне зволоження і надає відчуття свіжості.

Це ідеальний засіб для негайного та тривалого зняття симптомів сухості очей, таких як:

- втомлені та напружені очі,
- «пісок» в очах,
- відчуття печіння в очах,
- та/або коли очі сльозяться.

### **Сухість очей спричиняється:**

- зовнішніми чинниками, такими як тривала робота з комп'ютером, системи опалення та кондиціювання повітря, тютюновий дим, а також вітряна погода та/або носіння контактних лінз.
- іншими чинниками, такими як застосування деяких лікарських засобів (наприклад, оральних контрацептивів, антигістамінних препаратів, бета-блокаторів, спазмолітиків та сечогінних) або наявністю деяких захворювань, які можуть відігравати певну роль у розвитку сухості очей.

### **Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід при нанесенні на закриті очі:**

1. Освіжає повіки та поверхню шкіри навколо очей, а також забезпечує швидке полегшення таких симптомів, як лущення шкіри, подразнення повік або алергічних проявів.

2. Його можна використовувати як супутній засіб при лікуванні блефариту та блефарокон'юнктивіту.

3. Має подвійну дію з швидким і простим нанесенням:

- розпилить на закриті повіки, щоб освіжити та забезпечити комфорт втомленим очам,
- або нанесіть безпосередньо на поверхню очей під час моргання, щоб швидко зволожити та стабілізувати природну слізну плівку.

4. Зволожує повіки та поверхню шкіри навколо очей.

5. Забезпечує довготривале зволоження та негайне полегшення симптомів.
6. Використовується для тривалого застосування.
7. Швидко зволожує/змащує та стабілізує природний ліпідний шар очей і слізну плівку:
  - Містить гіалуронову кислоту для відновлення водного шару слізної плівки.
  - Містить ліпідний компонент, який відновлює ліпідний шар слізної плівки, природним чином змащуючи очі, затримуючи вологу.
8. Завдяки своїй лікарській формі спрей швидко зволожує та захищає очі, повіки і ділянку шкіри навколо ока.

### **Як часто і як довго слід користуватися Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід?**

Розпилюйте 1-2 рази Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід на поверхню ока або повіки за необхідності. Ви можете використовувати цей засіб щодня і так часто, як у цьому відчуватимете потребу. Жодних обмежень щодо тривалості застосування не існує.

Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід характеризується дуже високими показниками переносимості, оскільки не містить консервантів та буферних розчинів.

### **Спосіб застосування**

Запатентований механізм помпи Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід, дозволяє виробляти офтальмологічний зволожуючий розчин без консервантів.

Загальна примітка: Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід можна розприскувати на відкриті та закриті очі (повіки).

1. Перед кожним використанням зніміть з розпилювача/дифузора флакону прозорий білий захисний ковпачок, потягнувши його вгору.
2. Перед першим використанням, а також якщо флакон не використовувався протягом тривалого часу: 5-10 разів натисніть на помпу, поки не з'явиться однорідний спрей.
3. Застосування на відкриті очі: піднесіть розпилювач на відстань приблизно 10 см (см) від ока, він має знаходитись збоку від вашого обличчя, і швидким рухом натисніть на механізм помпи доки не з'явиться спрей.
4. Застосування на закриті очі: тримайте флакон на відстані приблизно 10 см (см) від закритої повіки і швидким рухом натисніть на механізм помпи доки

не з'явиться спрей.

5. Відразу після використання закрийте розпилювач флакону прозорим білим захисним ковпачком.

## **Застереження**

### **Коли не слід застосовувати Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід?**

Не використовуйте цей медичний виріб, якщо ви маєте надмірну чутливість до будь-яких його компонентів.

Важлива інформація щодо застосування Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід

- Дуже рідко повідомлялось про реакції місцевої гіперчутливості. У таких випадках лікування слід припинити. Якщо ви постійно відчуваєте дискомфорт або подразнення, припиніть застосовувати цей медичний виріб та зверніться до свого лікаря.
- Зверніть увагу, що після першого використання або після невикористання протягом деякого часу, необхідне первинне прокачування системи.
- Не торкайтесь кінчиком флакону пальців або очей, щоб запобігти його можливому мікробному забрудненню.
- Перед застосуванням медичного виробу зніміть контактні лінзи.

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі від + 2 до + 25°C.

Конструкція флакону дозволяє користуватись Artelac® EyeLid / Артелак® АйЛід протягом 6 місяців після відкриття упаковки.

## **Виробник**

Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ

Брунсбюттелер Дамм 165/173, 13581 Берлін, Німеччина/

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbuetteler Damm 165/173,13581 Berlin, Germany

Країна походження - Німеччина

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ "Бауш Хелс" 01103, м. Київ, вулиця Підвисоцького Професора, будинок 6-В, Україна