

Опис

ReNu MultiPlus - багатофункціональний розчин для всіх типів контактних лінз з функцією видалення поверхневих і глибоких відкладень.

Спосіб застосування

1. Змочіть зняту лінзу 2-3 краплями розчину і протріть подушечкою пальця з двох сторін протягом 20 секунд.
2. Після механічного очищення сполосніть обидві сторони лінзи розчином.
3. Сполосніть контейнер для лінз розчином ReNu MultiPlus.
4. Заливайте тільки свіжий розчин в контейнер; щільно закривайте флакон.
5. Залиште лінзи в розчині на 6 годин або на ніч.
6. З ранку лінзи очищені і готові до безпечного використання і комфортного носіння.
7. Використовуйте відкритий флакон протягом 3 місяців.