

Опис

Тест-смужка для визначення овуляції Тета №1 – тест для визначення періоду овуляції за даними сечі. Він допоможе визначити час, коли ймовірність завагітніти найбільша: при наближенні часу настання овуляції концентрація лютеїнізуючого гормону (ЛГ) в сечі істотно зростає.

Під час овуляції яйцеклітина виходить з яєчника. Оскільки яйцеклітина може бути запліднена тільки протягом 6-24 годин після овуляції, виявлення овуляції заздалегідь є дуже важливим.

Тест-смужка для визначення овуляції Тета №1 проводиться за допомогою речовин, що реагують на підвищення концентрації лютеїнізуючого гормону у сечі. Він працює за таким же принципом, як і тести для визначення вагітності.

Спосіб застосування

Не використовуйте зразок першої ранішньої сечі, адже ЛГ синтезується в організмі з ранку. Він з'явиться у сечі пізніше, протягом дня. Краще за все проводити аналіз у період з 10.00 до 20.00.

- Обмежте споживання рідини за 2 години перед проведення тесту, адже надмірний вміст рідини може перешкодити визначенню сплеску ЛГ у сечі.
- Тест необхідно проводити за кімнатної температури (18-30 °C).

Вийміть тест-смужку з герметичної пачки.

- Утримуючи тест-смужку вертикально, опустіть у посудину зі зразком сечі таким чином, щоб стрілки вказували вниз. Не занурюйте смужку глибше лінії maximum.
- Вийміть смужку через 5 секунд і покладіть її на чисту суху поверхню.
- Дочекайтеся появи кольорових смужок. Результат слід оцінювати не раніше ніж за 10 хвилин. Не беріть до уваги результат тестування через 30 хвилин.

Інтерпретація результатів

Позитивний результат: поява двох кольорових смужок, при цьому смужка тесту однаково темна або навіть темніша за контрольну смужку. Означає, що овуляція відбудеться через наступні 24-48 годин. Кращий час завагітніти у цьому випадку – після 24 годин, але не пізніше 48 годин.

Негативний результат: поява тільки однієї кольорової смужки в контрольній зоні тесту, або якщо смужка тесту світліша за контрольну, означає, що сплеску ЛГ немає.

Переваги:

- Основна перевага тесту для визначення овуляції Тета №1 полягає в підвищеній чутливості – 30 мМО/мл, що дозволяє точно визначати період овуляції. Компанія-виробник гарантує високу точність тесту – на рівні 97-99 %.
- Зручний та простий у використанні тест для оперативної самодіагностики.
- Тест виготовлений з високоякісних матеріалів.