

Опис

Антиварикозні вироби ТМ «Алком» виготовлені з високоякісних сучасних матеріалів за інноваційними технологіями, і прослужать вони набагато довше, ніж звичайні гольфи. Їх можна носити за будь-яких погодних умов: гольфи чудово пропускають повітря й відводять від шкіри вологу, тому в них не жарко влітку й не холодно взимку. Полотно середньої щільності відмінно приховує естетичні недоліки на шкірі (розширені вени, судинні сітки й ін.). Гольфи цієї серії випускаються з відкритим або закритим миском, у чорному або бежевому кольорі. Слід враховувати, що вироби другого класу компресії вимагають певних зусиль під час надягання. Можливо, вам знадобиться спеціальний пристрій. Перед застосуванням варто проконсультуватися з лікарем.

Дія

- зменшують діаметр розтягнутих вен, відновлюють нормальне функціонування венозних клапанів;
- нормалізують венозний кровоток, знижують ризик утворення тромбів;
- усувають набряки й біль у ногах.

Догляд за виробом

Прати щовечора вручну за температури не вище 40°C із застосуванням м'яких мийних засобів. Не терти, віджимати акуратно. Не викручувати! Сушити у розправленому вигляді на горизонтальній поверхні. Берегти від впливу сонячних променів і нагрівальних приладів. Не відбілювати й не кип'ятити. Недотримання цих рекомендацій може пошкодити структуру виробу та значно знизити лікувальну ефективність компресійного трикотажу.

Перед використанням необхідно ознайомитися з інструкцією із застосування і проконсультуватися з фахівцем.

Довжина гольфів: 36-44 см (cm)		Розмір	a	b	c
	a - розмір взуття	1	35-40	18-22	28-37
	b - окружність найвужчої частини гомілки над кісточкою, см (cm)	2	38-42	22-28	33-43
	c - окружність найширшої частини гомілки, см (cm)	3	40-44	28-34	37-49
		4	42-46	34-36	41-54

! Усі розміри подані у сантиметрах !

Знімати мірки краще за все вранці, коли ноги ще не набрякли. Якщо це неможливо, перед вимірюванням на 15-20 хвилин підійміть ноги вище таза

(ляжте й покладіть їх на подушку або сядьте й підніміть ноги на стіл, спинку стільця тощо). Якщо згідно з вимірами вам не підійде стандартний компресійний трикотаж (наприклад, за окружністю щиколотки потрібен перший розмір, а литки — третій), краще *замовити* компресійний виріб за *індивідуальними параметрами*.

Рекомендації щодо застосування

- гострий тромбофлебіт;
- часті нічні судоми в литках;
- друга та наступна вагітності;
- варикозні вузли без трофічних порушень;
- стани після склеротерапії й видалення вен;
- захворювання вен, які були ще до вагітності;
- множинні розширені вени довжиною понад 5 см;
- необхідність профілактики венозного тромбозу;
- сильні набряки ніг, що не минають за час нічного відпочинку;
- необхідність профілактики рецидиву венозної трофічної виразки.

Технічні характеристики

Клас компресії	II (23—32 мм рт. ст.)	
Країна виробник	Україна	
Розміри	1, 2, 3, 4	
Виробник	Алком	
Матеріал	поліамід — 70%, еластан — 30%	
Вид	гольфи	
Тип	компресійний трикотаж	
Призначення	Клас компресії	II (23—32 мм рт. ст.)
	Країна виробник	Україна
	Розміри	1, 2, 3, 4
	Виробник	Алком
	Матеріал	поліамід — 70%, еластан — 30%
	Вид	гольфи
	Тип	компресійний трикотаж

	Призначення	унісекс
--	-------------	---------

Склад

Поліамід — 70%, еластан — 30%.