

Опис

Тест струменевий Ultimate це однокроковий імунохроматографічний аналіз, що виконується самостійно, розроблений для кількісного визначення людського хоріонічного гонадотропіну (ХГЛ) в сечі з метою виявлення вагітності.

Властивості

- комфорт та гігієнічність;
- в будь-який час;
- до затримки менструації;
- точність результату 99,9%;
- у будь-яких умовах;
- не потрібно збирати сечу;
- з 7-го дня зачаття;
- чутливість 10 мМО/мл

Спосіб застосування

- Дістаньте тест із герметичної упаковки, відкривши по лінії відриву. Зніміть захисний ковпачок.
- Тримайте виріб кінцем з абсорбентом донизу. Підставте кінець із абсорбентом під струмінь сечі приблизно на 5-7 секунд. Надягніть захисний ковпачок.
- Як варіант, сечу можна зібрати в чисту чашу і потім занурити туди кінець з абсорбентом приблизно на 5-10 секунд, поки зразок сечі не переміститься до вікна для зчитування результату тесту.
- Надягніть захисний ковпачок. Дочекайтеся появи кольорових смужок і починайте зчитувати результати. Позитивний результат можна визначити одразу, як тільки смужки виявляться.
- Негативний результат може бути підтверджений через 5-10 хвилин. Перш ніж інтерпретувати результати, переконайтеся, що фон тестової зони має білий колір.
- Перевірте результат через 10 хвилин, дотримуючись інструкцій у розділі «Інтерпретація результатів».