

## **Опис**

Рекомендована для новонароджених та маленьких дітей, нормальної і субтильної статури, а так само для нововиявлених хворих бояться ін'єкцій з нормальною масою тіла.

У виробництві голок використовуються новітні тонкостінні технології, голки обробляються і покриваються потрійним силіконовим покриттям, що дозволяє виробляти процедуру введення інсуліну практично безболісно.

Незалежно від різновидів інсулінових ручок будь-яка голка сумісна з усіма інсуліновими ручками провідних виробників, завдяки універсальній гвинтовій різьбі.

При всьому різноманітті вибору голок різних виробників необхідно звертати увагу на те, що всі голки різні за довжиною і товщині, що важливо в залежності від особливостей будови тіла кінцевого споживача

## **Технічні характеристики**

- тип: одноразові, стерильні
- довжина голки 6 mm
- зовнішній діаметр 0.25 mm

## **Застосування**

- Видаліть захисну плівку індивідуальної упаковки.
- Тримайте голку прямо і поверніть ковпачок в праву сторону.
- Зніміть і збережіть цей зовнішній захисний ковпачок.
- Зніміть внутрішній захисний ковпачок.
- Проколите шкіру і зробіть ін'єкцію інсуліну згідно з приписами лікаря.
- Одягніть зовнішній захисний ковпачок на голку, відкрутіть її і забезпечте безпечну утилізацію голки.