

Опис

A-med "Non woven" випускається в компактній упаковці, яка не займе багато місця в домашній аптечці і може стати надійним помічником під час ваших подорожей.

Гіпоалергенна адгезивна речовина пластиру не подразнює шкіру, але ізолює нервові закінчення і сприяє зменшенню больових відчуттів. Неткане полотно захищає рану від тертя, тиску, води та мікробів. Поглинаюча подушечка - віскоза з перфорованою поліефірною сіткою з високою гігроскопічністю. Завдяки створенню оптимально зволоженої, «дихаючої» ранозагоювальної середовища, пластир сприяє пом'якшенню шкіри, тому, крім ран, допомагає при мокрих мозолях, сухих мозолях і натоптишах.

Медичний пластир A-med не зміщує і не стягує шкіру. Він також має подушечку, яка делікатно контактує з ураженими ділянками, не прилипаючи до них. Після використання пластирі легко і безболісно знімаються, не залишаючи слідів. Це дуже зручно тим, що можна використовувати відрізки потрібної довжини.

Його зручно використовувати на рухомих ділянках тіла: колінах, пальцях, ліктях, п'ятах.

Перед застосуванням рекомендуємо очистити пошкоджені та прилеглі ділянки шкіри.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів.

Спосіб застосування

Дістаньте пластир з паперового пакета, зніміть захисну смужку і, не торкаючись пальцями сорбційної подушечки, нанесіть її на пошкоджену поверхню шкіри.

Надійно зафіксуйте краю пластиру, не допускаючи появи зморшок.

Міняти пластир рекомендується не рідше 2 разів на день.

Пластир A-med "Нетканый" запобігає потраплянню води та бруду в рану. А спеціально розроблена ультратонка гіпсова основа з еластичного нетканого матеріалу є абсолютною гарантією запобігання проникненню зовнішніх забруднювачів в рану.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 5 до 25 °С.

Упаковка

По 20 штук в упаковці