

Спосіб застосування

1. Вставте батареї AAA.
2. Вставте палець у прогумований отвір пульсоксиметра нігтьової пластиною вгору.
3. Натисніть кнопку на передній панелі приладу.
4. Не рухайте пальцем і не змінюйте положення тіла, поки триває діагностика.
5. Натисніть кнопку, щоб змінити режим відображення.
6. Прочитайте результати дослідження на екрані.
7. Прилад автоматично вимкнеться через 8 секунд, якщо немає сигналу діагностики.