

Склад

Стерильний, буферний, ізотонічний водний розчин, що містить натрію цитрат, натрію хлорид, кислоту борну, сорбіт, динатрію едетат, амінометілпропанол і ТЕТРОНІК 1304 * (Полоксамін) - в якості очищувальних компонентів; ПОЛІКВАД® (полідронія хлорид) 0,001% і АЛДОКС (мірістамідопропіл диметиламин) 0,0005% - в якості консервантів.

Опис

Opti-Free Express - багатофункціональний дезінфікуючий розчин для всіх типів контактних лінз з сильною антимікробною дією. Підходить для чутливих очей.

Opti-Free Express: особливості та переваги розчину

- використовуйте Opti-Free Express кожен день, щоб додатково не очищати лінзи пероксидними системами і ензимними таблетками;
- змазуючий компонент Tetronic 1304 утримує вологу на поверхні лінзи, створюючи тонку гідрофільну плівку і продовжуючи комфортне носіння;
- посилена формула дезінфекції видаляє бактерії, дріжджові і цвілеві грибки, акантамеб;
- видаляє білкові, ліпідні та кальцієві відкладення;
- після обробки розчином поверхню лінзи відштовхує відкладення;
- безпечний консервант POLYQUAD не проникає в епітеліальні клітини рогівки і не шкодить очам;
- підходить для чутливих очей;
- сумісний з усіма типами контактних лінз.

Лікарська форма

Розчин для контактних лінз

Показання

- очищення;
- дезінфекція;
- ополіскування;
- змазування;
- зволоження;
- зберігання;
- видалення протеїнових і ліпідних відкладень;

- видалення неорганічних відкладень.

Протипоказання

Не застосовувати препарат при індивідуальній чутливості до компонентів розчину.

Спосіб застосування та дози

вранці:

1. Обов'язково вимийте руки перед тим, як одягнути лінзи.
2. Обполосніть КЛ з обох сторін розчином.
3. Ваші КЛ готові до використання.
4. Вилийте використаний розчин з контейнера, сполосніть його свіжим розчином і просушіть.

увечері:

1. Обов'язково вимийте руки перед тим, як зняти лінзи.
2. Обполосніть КЛ з обох сторін розчином.
3. Проведіть механічну очистку з обох сторін (при необхідності).
4. Наповніть контейнер для зберігання КЛ свіжим розчином так, щоб лінзи були повністю покриті.
5. Залиште КЛ в закритому контейнера мінімум на 6 годин або на ніч.

Умови зберігання

Зберігати при кімнатній температурі в упаковці виробника.

Упаковка

Флакони з розчином 120 мл, контейнер для контактних лінз у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Сія Хенсон, Латвія.