

Опис

Пластир для ран №200 на тканинній основі 19х72мм "DR. BAUER"

Універсальні набори пластирів з подушечкою на тканинній основі широкого спектру використання. Форма випуску стріп.

Рекомендації щодо застосування

Призначений для фіксації пошкоджених пальців, при наданні першої допомоги в разі дрібних ран, подряпин, порізів.

Спосіб застосування

Перед використанням вийняти пластир з паперового пакету та зняти захисну плівку, після чого подушечкою прикласти до рани, а краї пластиру притиснути до шкіри. Пластир може залишатись на шкірі протягом доби.

Протипоказання

Гіперчутливість до основи пластиру, клеючої речовини.

Побічні ефекти

Подразнення шкіри у місці приклеювання.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 5°C до 35°C.