

## **Опис**

Підгузки для дорослих Super Seni - це хороший та перевірений захист при середньому та важкому ступеню нетримання. Дуже зручні для малорухомих та лежачих пацієнтів.

Повітропроникний зовнішній шар на всій поверхні підгузка зводить кількість подразнень та попрілостей до мінімуму.

Еластична поясна резинка спереду і ззаду та 2 пари еластичних застібок-липучок забезпечують оптимальне прилягання до тіла.

Інформацію про наповнення та необхідність заміни підгузка дають 2 індикатори вологості: клейовий у вигляді смуг та напис з інформацією про виріб.

Завдяки антибактеріальному суперабсорбенту підгузок добре поглинає та утримує вологу всередині, а також нейтралізує неприємні запахи.

Спеціальний розподіляючий шар EDS забезпечує швидке та рівномірне поглинання, а м'який нетканий матеріал на поверхні – комфорт у використанні.

Можуть використовуватися як при нетриманні сечі, так і при нетриманні калу.

- Поглинання: 2600 г
- Розмір: XL (4)
- Об'єм талії і стегон: 130-170 см
- Кількість в упаковці: 30 шт.

## **Спосіб застосування**

Перед надяганням підгузок слід "активувати", розправити.

Активований підгузок розмістити між ногами, розправити його спереду і ззаду так, щоб він добре прилягав до тіла. Закріпіть підгузок за допомогою застібок-липучок, починаючи з нижніх застібок, які приклейте трохи по діагоналі догори. Після закріплення нижніх застібок закріпіть верхні застібки-липучки, фіксуючи підгузок на талії. Надягнувши підгузок, переконайтеся, що липучки добре закріплені, а підгузок добре прилягає до тіла. При цьому зверніть увагу на те, щоб захисні оборки в паховій області не підгорнулися всередину і підгузок ніде не стискав тіло.

Використаний підгузок згорніть і викиньте у смітник. Не викидайте використаний виріб в унітаз.

## **Склад**

Целюлоза, нетканый материал, паропроникный верхний шар, суперабсорбент.